


PLEXTALK®

PLEXTALK PTP1

Version 5

Användarmanual

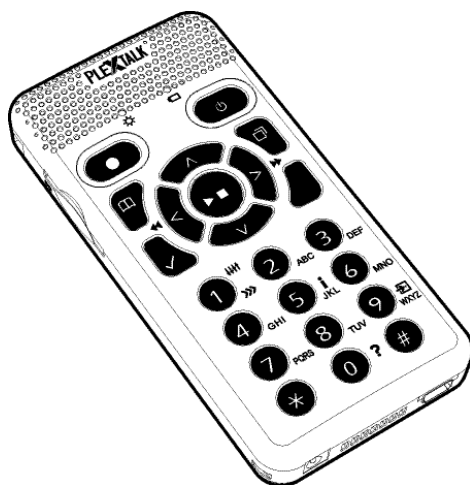

©2008 Shinano Kenshi Co., Ltd.

Viktig Information

FCC-information

Överensstämmelsedeklaration

Modellnummer: PTP1

Handelsnamn: PLEXTALK

Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Address: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Denna enhet överensstämmer med del 15 av regelverket FCC och användning av enheten sker under följande två villkor:

- (1) Enheten får ej skapa skadliga störningar, och
- (2) Enheten måste hantera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan skapa driftproblem.

Denna utrustning har testats och överensstämmer med begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt del 15 av regelverket FCC. Dessa begränsningar är designade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan stråla energi i form av radiovågor, och om den inte installeras samt används enligt instruktionerna kan den skapa skadlig störning för radiokommunikation. Emellertid finns det inga garantier för att störningar inte inträffar i en specifik installation. Om utrustningen skapar skadlig störning för radio- eller TV-mottagning som kan upptäckas genom att slå på och av utrustningen bör användaren försöka en eller flera av följande åtgärder för att korrigera störningen:

- Byt plats på eller rikta om den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen i ett uttag som inte är i förbindelse med uttaget som mottagaren är anslutet till.
- Konsultera din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.

Observera:

Alla ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av garantiskyldiga parter kan upphäva slutanvändarens rätt att använda utrustningen.

Innehållsförteckning

Viktig Information	2
Innehållsförteckning	3
1. Lag- och copyright-information	8
1.1. Copyright-information om denna användarmanual	8
1.2. Licenser och varumärken	8
1.3. Restriktioner för kopiering	8
1.3.1. Allmän information	9
1.3.2. Musikskivor	9
2. Kom igång	10
2.1. Terminologi och konventioner som används	10
2.2. Vad som finns i lådan	10
2.3. Beskrivning av enheten	11
2.3.1. Framsidan	11
2.3.2. Övre kanten	12
2.3.3. Vänstra kanten	13
2.3.4. Högra kanten	13
2.3.5. Nedre kanten	13
2.3.6. Baksidan	13
2.4. Sätta in batteriet	14
2.5. Ladda PLEXTALK	14
2.6. Underhåll och batteriskötsel	15
2.6.1. Skötsel av enheten	15
2.6.2. Batteriskötsel	15
2.6.3. Märke med överkryssad soptunna	16
2.7. Slå på och av PLEXTALK	16
2.8. Funktionen knappbeskrivning	17
2.9. Funktionen knapplås	17
2.10. Sätta in och ta ut SD-kort	17
3. Introduktion till menysystemet	19
3.1. Huvudmenyn	19
3.2. Aktivera och navigera menyn	19
3.3. Genvägar för menyval	20
4. Ställa in din PLEXTALK	21
4.1. Ställ in din önskade talsyntes	21
4.2. Ställ in tonhöjden för talsyntesen	21
4.3. Ställ in datum och tid	21
4.4. Välj önskat vänteljud	22
4.5. Välj Ljud för knapptryckning	22
5. Strömfunktioner	24

5.1. Varning vid låg batterinivå.....	24
5.2. Funktionen energispar	24
5.3. Påtvingad avstängning.....	24
5.4. Automatisk avstängning	24
5.4.1. Ställa in Automatisk avstängning.....	24
5.4.2. Avbryt Automatisk avstängning	25
6. Uppspelningsfunktioner gemensamma för alla format.....	26
6.1. Starta och stoppa uppspelningen.....	26
6.2. Snabbspolning framåt och bakåt.....	26
6.3. Ändra volymen för uppspelning.....	27
6.4. Ändra hastigheten för uppspelning.....	27
6.5. Ändra tonläget för ljudet	27
6.6. Ändra volymen för guiderösten	28
6.7. Ändra hastighet för guideröst	28
6.8. Aktivera navigationsmenyn	28
6.9. Välj media och bok.....	29
6.10. Navigation efter titel	29
6.11. Hoppa direkt till en bok.....	30
6.12. Ändra titlarnas sorteringskriterier	30
6.13. Få information om media och bok.....	31
6.14. Meddela aktuell status.	31
6.15. Välj uppspelningsläge	31
6.16. Använda bokmärken	32
6.16.1. Bokmärkestyper.....	32
6.16.2. Lägga in bokmärken	32
6.16.3. Navigera till bokmärken	33
6.16.4. Radera bokmärken	34
6.16.5. Inställning för uppspelning av röstbokmärken.....	34
6.17. Gruppering av filer och mappar i PLEXTALK.....	35
7. Spela Daisyböcker.....	36
7.1. Navigering efter rubriker.....	36
7.2. Flytta till början eller slutet i en Daisyboken	36
7.3. Navigering efter sidor	37
7.4. Navigering efter grupp.....	37
7.5. Navigering efter fras.....	37
7.6. Snabbhopp på 10 minuter, snabbhopp på 30 sekunder.....	38
7.7. Navigering efter skärm, stycke, rad, mening, bokstavering, ord eller tecken i Daisy textläge	38
7.8. Navigering efter procent.....	38
7.9. Uppspelningsläge.....	39
7.10. Uppspelningsinställning för Multimedia DAISY	39
8. Lyssna på "inspelningar"	40

9. Spela upp ljudfiler eller musikskivor	41
9.1. Navigering efter spår	41
9.2. Navigering efter album	42
9.3. Snabbhopp på 10 minuter, snabbhopp på 30 sekunder.....	42
9.4. Uppspelningssläge.....	42
9.5. Meddelar album och spår vid namn eller nummer.	43
9.6. Spelordning för filer och mappar	43
9.7. Begränsningar i ljudfiler.....	43
10. Spela upp textfiler.....	45
10.1. Navigera efter skärm, stycke, rad, mening, bokstavera, ord eller tecken	45
10.2. Navigering efter procent.....	45
10.3. Uppspelningssläge.....	45
11. Spela ljudböcker.....	47
12. Poddradio.....	48
12.1. Lägg till poddradio i PLEXTALK.....	48
12.2. Lyssna på poddradio för första gången.....	48
12.3. Spela poddradio	49
12.4. Navigering från episod till episod eller snabbhopp på 10 minuter respektive 30 sekunder	49
12.5. Skaffa senaste listan med episoder	50
12.6. Nedladdning av seriens samtliga episoder.....	50
12.7. Nedladdningsinformation	50
13. Webbradio	52
13.1. Lägg in webbradiostationer i spellistan	52
13.2. Lyssna på webbradio	52
14. Spela in en Daisybok.....	53
14.1. Grundläggande information om inspelning med PLEXTALK.....	53
14.2. Inspelningshårdvara	53
14.3. Inspelningsbara medium	54
14.4. Olika tillstånd vid inspelning	54
14.5. Grundläggande inspelningsteknik	54
14.6. Tysta guiderösten under inspelning	55
14.7. Anslut och välj ingångskälla	56
14.8. Välj inspelningssläge samt ljudkvalité	57
14.8.1. Inspelningsslägen och ljudkvalité	57
14.8.2. Välj ett förinställt inspelningssläge.....	57
14.8.3. Välj skräddarsytt inspelningssläge	58
14.9. Välj bok att spela in på	59
14.10. Ställ in inspelningsnivån.....	60
14.11. Övervakning av ljudnivå vid inspelning	61
14.12. Övervakning av ljudnivå vid inspelning på och av	61
14.13. Information om inspelningen	62

15. Redigera en Daisybok	63
15.1. Redigera rubrikmarkeringar under inspelning	63
15.2. Lägg in en rubrik efter inspelning	63
15.3. Radera en rubrik efter inspelning	64
15.4. Radera ett eller flera avsnitt	64
16. Funktioner vid Hantera lagringsmedia	66
16.1. Radera ett SD-kort	66
16.2. Skapa en ny bok	66
16.3. Radera en bok.....	66
16.4. Filradering	67
16.5. Förbered för redigering av en Daisybok	67
16.6. Färdigställ en Daisybok.....	68
16.7. Nätverksmappfunktionen	68
17. Anteckningsfunktionerna i PLEXTALK.....	70
17.1. Spela in en ny röstanteckning	70
17.2. Lyssna på existerande röstanteckningar.....	70
17.3. Kopiera röstanteckningar till SD-kort.....	71
17.4. Radera röstanteckningar	71
18. Kopiera.	72
18.1. Allmän information om kopiering	72
18.2. Kopiera röstanteckningar	72
18.3. Kopiera en Daisybok, album eller textfil från ett SD-kort till en USB-enhet	73
18.4. Kopiera en Daisybok, album eller textfil från en extern USB-enhet till ett SD-kort	73
18.5. Kopieringstid för en musikskiva.....	74
19. Använda PLEXTALK som en SD-kortläsare	75
19.1. Vad kan PLEXTALK användas till när den är ansluten till en dator?.....	75
19.2. Ansluta PLEXTALK till en dator som en extern enhet	75
19.3. Koppla ur PLEXTALK från en dator	75
20. Nätverksinställningar	77
20.1. Anslut till trådlöst nätverk	77
20.1.1. Aktivera nätverksenheten	77
20.1.2. Verifiera att trådlöst nätverk är tillgängligt och anslut	77
20.2. Så här ansluts PLEXTALK till nätverk	79
20.3. Avancerade nätverksinställningar	79
20.3.1. Verifiera nätverksinformationen	79
20.3.2. Hämta in nätverksinställningar.....	80
20.3.3. Spara nätverksinställningar	81
20.3.4. Lägg till nätverksinställningar för trådlöst nätverk	81
20.3.5. Ändra eller radera inställningar för trådlöst nätverk	82
20.3.6. Inställningar för nätverksmappar	83
20.3.7. Återställning av nätverksparametrarna till fabriksinställningarna	84
21. Redigering av textfiler	85

21.1. Skapa en ny textfil	85
21.2. Redigering av befintlig textfil sparad på SD-kortet	85
21.3. Spara redigerad text.....	85
21.4. Lämna textredigeringen	86
21.4.1. Spara och lämna textredigeringen.....	86
21.4.2. Lämna textredigering utan att spara filen.....	86
21.5. Omdöpning av filer	87
21.6. Radering av rad.....	87
21.7. Radering av hela texten	87
22. Textinmatning	88
22.1. Alfabetisk inmatning enligt ABC-metoden	88
22.2. Sifferinmatning enligt nummermetoden.....	89
22.3. Symbolinmatning enligt symboltabellen	89
22.4. Flytta inmatningsmarkören	90
22.5. Inmatning av mellanslag, radskifte och teckenradering.....	91
23. Andra användbara funktioner	91
23.1. Aktivera den inbyggda hjälpfilen.....	92
23.2. Kontrollera systemegenskaper	92
23.3. Radering av behörighetskoder	92
23.4. Återställ PLEXTALK till fabriksinställningar	93
Appendix A - Huvudspecifikationer	95
Allmänna specifikationer	95
Ljudegenskaper	96
Huvudfunktioner.....	97
Batterispecifikationer.....	98
Specifikationer för minneskortläsare	98
Trådlös kommunikation	99
Upphovsrättsinformation om Ogg Vorbis.	99
Appendix B - Menyhierarkin	100
Appendix C - Felsökning.....	103
Generella driftproblem.....	103
Felmeddelanden vid uppspelning av Daisy.....	104
Fel vid användning av Röstanteckningar	104
Fel när PLEXTALK används som extern kortläsare för en dator.....	104
Appendix D - Tekniska data för inspelningslägen och ljudkvalité	106
1. Inspelningslägenas inställningar	106
2. De förinställda inspelningslägenas parametrar	106
3. Tillgängliga inställningar för läget skraddarsytt	107
4. Möjlig inspelningstid för olika ljudkvalitéer.....	107
Appendix E - Frågor och svar rörande nätverksinställning	109
Appendix F - Lista över textinmatningar	111

1. Lag- och copyright-information

Detta kapitel innehåller viktig information om copyright, licenser och varumärken. Det beskriver också restriktioner som gäller vid användning av PLEXTALK för kopiering och inspelning av digitalt ljud. Du rekommenderas verkligen att läsa detta kapitel ordentligt innan du fortsätter.

1.1. Copyright-information om denna användarmanual

Shinano Kenshi reserverar alla rättigheter till att modifiera produkterna som beskrivs i denna manual när som helst utan tidigare förvarning.

Shinano Kenshi ger inga utfästelser eller garantier med avseende på innehållet och reserverar sig uttryckligen alla underförstådda garantier av säljbarhet eller lämplighet för något särskilt ändamål. Ytterligare reserverar Shinano Kenshi Co., Ltd. Rätten att revidera denna manual och göra ändringar i dess innehåll utan skyldighet att underrätta någon person eller organisation om sådan revidering.

Denna manual är upphovsrättsskyddad. Alla rättigheter reserverade. Den får inte kopieras, fotokopieras, översättas eller överföras till något elektroniskt medium eller maskinläslig form utan förbehållna rättigheter från Shinono Kenshi.

Användarmanual copyright 2008 Shinano Kenshi Co., Ltd.

1.2. Licenser och varumärken

Alla licenser och varumärken är egendom för sina respektive ägare.

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, samt Windows 7 är varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

iTunes är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

1.3. Restriktioner för kopiering

Innan du använder din PLEXTALK bör du läsa följande viktiga information för att försäkra dig om att du förstår de lagliga restriktioner som gäller vid användning av vissa funktioner.

1.3.1. Allmän information

Denna PLEXTALK är designad för att hjälpa dig spela in och reproducera ljudarbeten för vilka du äger rättigheterna till eller som du har fått rättigheter till utav rättighetsägaren. Så till vida du inte äger rättigheterna eller fått tillåtelse från rättighetsägaren kan dina icke auktoriserade inspelningar, reproduktioner eller distributioner resultera i lagbrott under rättighetslagar och internationella upphovsrättslagar. Om du är osäker på dina rättigheter, kontakta juridisk rådgivning.

Under inga omständigheter kan Shinano Kenshi hållas ansvariga för konsekvenser efter någon form av olaglig kopiering utförd med denna PLEXTALK.

1.3.2. Musikskivor

Kopior av musikskivor är endast för enskilt bruk och får, under upphovsrättslagarna, inte användas på andra sätt utan särskild tillåtelse från rättighetsägaren.

2. Kom igång

2.1. Terminologi och konventioner som används

Detta avsnitt beskriver terminologin och konventioner som används i manualen. Detaljer följer nedan:

- Varning: En varning betyder att skaderisk föreligger.
- Observera: Observera betyder att det föreligger risk att skada eller förstöra PLEXTALK, förstöra inspelningsmedium, förstöra eller påverka lagrad data eller datorkonfiguration.
- Märk: Märk används för att ge ytterligare viktig information, som ej redan nämnts, om en funktion.
- SD-kort: PLEXTALK kan använda kort av typen "SD" och "SDHC". I denna användarmanual är båda korten kallade "SD-kort".

2.2. Vad som finns i lådan

Nedan följer en lista med alla delar som du bör finna i lådan tillsammans med din PLEXTALK. Försäkra dig om att alla delar finns med. Om det saknas någon del, var god kontakta din lokala återförsäljare.

- 1 PLEXTALK Pocket
- 1 SD-kort på 2GB (Märk: SD-kortet levereras förinstallerat i enheten)
- 1 strömadapter
- 1 uppladdningsbart batteri
- 1 par stereohörlurar
- 1 USB-kabel (lång) för anslutning till en dator
- 1 USB-kabel (kort) för anslutning till ett USB-tillbehör
- 1 väska
- 1 skiva med användarmanual
- 1 snabbguide
- 1 guide med säkerhetsinstruktioner

Märk: Det är starkt rekommenderat att du behåller förpackningen i fall du behöver återsända din PLEXTALK i framtiden av någon orsak.

2.3. Beskrivning av enheten

Detta avsnitt ger en fysisk beskrivning av PLEXTALK, knapparnas placering och andra kontroller så att du kan finna dem när de nämns i senare kapitel. Namnen och huvudsyftena beskrivs också här.

Försök att hitta framsidan på enheten samtidigt som du håller den försiktigt. Framsidan har mikrofonen samt högtalargaller på ena sidan och 23 knappar arrangerade över resterande del av ytan. Vänd enheten så att du håller den med knapparna mot dig och delen med högtalargaller uppåt på enheten. PLEXTALK ligger nu i sin normala position för användning. Håll enheten denna position under den fysiska beskrivningen.

2.3.1. Framsidan

Högtalargallret som du använde för att orientera enheten är var den interna högtalaren samt den inbyggda mikrofonen sitter. Högtalaren sitter till höger och mikrofonen sitter i mitten.

Precis nedanför gallret i mitten finns 2 lysdioder. Den som sitter till vänster är lysdioden som indikerar ström. Den bör vara släckt när enheten är avstängd. Den blir en orange färg under uppstart. Den lyser med ett grönt ljus när enheten är på. Lysdioden till höger är indikator för batteriet och visar laddningsstatus. Den är av när PLEXTALK är igång på batteridrift. Under första uppladdningsfasen visar den ett rött ljus. Under den andra uppladdningsfasen växlar den mellan rött och grönt ljus och när batteriet är fulladdat visar den ett fast grönt ljus.

Nedanför högtalargallret, till vänster och höger om lysdioderna sitter två ovala knappar. Knappen till vänster är röd till färgen och är Inspelningsknappen som används för Daisyinspelning, Röstanteckningar samt för inspelning av Röstbokmärken. Knappen till höger är strömbrytaren som är grön till färgen och används för att slå på/av enheten samt ställa in automatisk avstängning. I mitten av denna knapp finns två taktila punkter.

Nedanför Inspelningsknappen och strömbrytaren sitter 4 funktionsknappar - två till vänster och 2 till höger på enheten. Den övre vänstra knappen är knappen Gå till som används för att navigera till sidor och rubriker. Den nedre vänstra knappen är Bokmärkesknappen som används för att navigera till, lägga in samt radera bokmärken. Den övre högra knappen är Meny-knappen som används för att aktivera huvudmenyn.

Tryck ner och håll in denna knapp för att slå på och av Knappbeskrivningsläget. Den nedre högra knappen Titel och används för att ändra bok eller media.

Mellan de 4 funktionsknapparna, i mitten av enheten, finns den runda knappen Start/Stopp omgiven av fyra pilknappar - Upp, Ner, Vänster och Höger. Knappen Start/Stopp är svagt skålad inåt och blå till färgen. Den används för att starta och stoppa uppspelningen samt fungerar som Enter för flera funktioner. Knappen Upp används för att flytta upp i listan med navigationsalternativ. Den används också för att öka hastigheten och tonläget samt för att avbryta funktioner. Knappen Ner används för att flytta ner i listan med navigationsalternativ. Den används också för att minska hastigheten och tonläget samt fungerar som Enter för vissa funktioner. Knappen Vänster används för att flytta till vänster i menyer eller bakåt i en bok. Tryck ner och håll inne knappen för Snabbspolning tillbaka. Knappen Höger används för att flytta till höger i menyer eller framåt i en bok. Tryck ner och håll inne knappen för Snabbspolning framåt.

Nedanför funktionsknapparna och pilknapparna finns ytterligare 12 små runda knappar arrangerade i 4 rader med 3 knappar i varje. Dessa kallas vanligtvis för nummerknapparna. Nummerknapparna sitter placerade precis som på knapptelefoner. Första raden har siffrorna 1, 2 och 3. Den andra raden har siffrorna 4, 5 och 6. Den tredje raden har siffrorna 7, 8 och 9 och den fjärde raden har knapparna Stjärna, 0 och Fyrkant. Knappen 5 har en liten taktill punkt i mitten som hjälper dig att finna den.

Vissa knappar har sekundära funktioner och dessa listas nedan:

- Nummer 1 = Ändrar hastighet eller tonläge i kombination med Upp eller Ner.
- Nummer 5 = Informationsknapp. Tryck en gång för en lista med information. Tryck upprepade gånger för att snabbt stega genom listan med information. Tryck ner och håll inne för att få aktuellt datum och tid.
- Nummer 9 = Kopiera Filer
- Nummer 0 = Hjälp. Tryck en gång för att aktivera den inbyggda hjälpfilen.
- Stjärna = Ångra/Avbryt
- Fyrkant = Gör om/Enter

I denna manual syftar termen "knappen Enter" till knappen Start/Stopp, Ner eller Fyrkant. Termen "knappen Avbryt" syftar till knappen Upp eller Stjärna.

2.3.2. Övre kanten

På övre kanten av PLEXTALK finns 2 kontakter – en till vänster och en i mitten. Kontakten till vänster används för att ansluta en extern mikrofon eller en line-in-enhet och kontakten i mitten används för hörlurar. Alla kontakter är 3.5 mm i diameter och av typen stereo mini-plugg.

I övre vänstra hörnet finns ett litet hål som används för att fästa en bärrem om det behövs.

2.3.3. Vänstra kanten

På vänstra kanten av enheten, ungefär i nivå med Inspelningsknappen finns en plats för SD-kort.

2.3.4. Högra kanten

På den högra kanten av enheten finns 2 reglage. Det övre reglaget används för att öka och minska volymen. För att öka volymen trycker man reglaget uppåt. För att minska volymen trycker man reglaget neråt.

Det nedre reglaget är knappen för Knapplås. Denna används för att undvika oavsiktliga knapptryckningar på andra knappar, inklusive strömbrytaren. För att låsa alla knappar trycker man reglaget uppåt. För att låsa upp knapplåset trycker man reglaget neråt.

2.3.5. Nedre kanten

Det finns kontakter på nedre kanten av enheten. Till vänster finns ett litet runt hål med en svag taktill fyrkant runt om. Detta är strömkontakten. Till höger sitter en liten rektangulär kontakt. Detta är USB-kontakten.

2.3.6. Baksidan

Vänd försiktigt på din PLEXTALK och håll den med knapparna neråt i en hand, håll kanten vid högtalargallret från dig.

I mitten på baksidan finns 2 taktila linjer. Dessa är placerade på övre kanten av batteriluckan. Mot nedre kanten av enheten, men fortfarande på baksidan, sitter en rektangulär knapp som ligger i nivå med ytan. Denna knapp sitter på nedre kanten av batteriluckan och används för att lossa batteriluckan.

För att kunna ta lös batteriluckan måste den rektangulära knappen tryckas ner med en fingertopp. Samtidigt ska luckan dras ner mot den nedre kanten av enheten med hjälp av en tumme på de 2 taktila linjerna på batteriluckan. Den lossnar ganska enkelt men du kan behöva öva några gånger för att behärska tekniken ordentligt.

2.4. Sätta in batteriet

För att sätta in eller byta ut batteriet, gör följande:

- Slå av strömmen och ta ur strömadaptern.
- Ta bort batteriluckan så som det beskrivs i det föregående avsnittet och lägg PLEXTALK samt batteriluckan åt sidan.
- Sök reda på det nya batteriet och vrid det så att kanten som är helt slät är riktad ifrån dig och kanten som har 2 tydliga piggar är riktad åt höger. Vid dessa två piggar sitter batterikontakterna.
- Om vi antar att du gjort detta korrekt skall det finnas ytterligare 2 mindre piggar på varje sida om det nedre vänstra hörnet. Notera att dessa är användbara när du försöker att ta ur batteriet senare.
- Ta upp PLEXTALK och försäkra dig om att sidan med knapparna är neråt och batteriutrymmet är riktat mot dig. Sätt försiktigt in batteriet från vänster till höger. Sätt in batteriets högra kant i spelaren först. Om du försöker sätta in batteriet med vänster kant först går det inte att trycka ner på plats.
- Tryck tills batteriet glidit in helt mot högra kanten och tryck sedan försiktigt på vänster sida av batteriet så att det lägger sig på plats i utrymmet. Använd inte kraft för att sätta in batteriet, det är onödigt.
- Placera batteriluckan över batteriutrymmet cirka 5 millimeter från dess normala läge. Medan du trycker batteriluckan mot batteriutrymmet, skjuter du varsamt batteriluckan tillbaka uppåt mot överkanten tills den rektangulära knappen snäpper in i låst läge.

Varning: Du bör endast använda rekommenderade batterier i denna enhet. Om man inte gör det kan i värsta fall en explosion eller brand uppstå.

Märk: För att ta ut ett gammalt batteri, lyft försiktigt i nedre vänstra hörnet på batteriet med hjälp av en fingernagel under en av de två piggarna som finns på var sida om det nedre vänstra hörnet på batteriet. Lyft ut batteriet ur utrymmet. Det krävs lite träning men är enkelt så snart du behärskar tekniken.

2.5. Ladda PLEXTALK

För att ladda det interna batteriet måste du ansluta PLEXTALK till ett vägguttag med den medföljande strömadaptern eller till en dator med den medföljande USB-kabeln. Gör följande:

- Placera PLEXTALK med framsidan uppåt i den normala positionen för användning.
- För att ladda batteriet via vägguttaget, anslut den medföljande strömadaptern till strömkontakten på nederkantens vänstra sida. Anslut sedan strömadaptern till ett vägguttag. Uppladdningen kommer att starta.

- För att ladda batteriet via en USB-anslutning måste den mindre kontakten på den långa USB-kabeln anslutas till USB-kontakten till höger på nederkanten av PLEXTALK. Sedan måste den bredare änden på kabeln anslutas till en ledig USB-kontakt på en dator. Försäkra dig om att datorn är igång så kommer uppladdningen att starta.

Observera: Använd inte kraft när du ansluter USB-kabeln för då kan du skada den.

Märk: Uppladdning via USB-kabel fungerar med enheten avstängd.

2.6. Underhåll och batteriskötsel

2.6.1. Skötsel av enheten

Torka av damm och smuts från PLEXTALK med en mjuk tygbit fuktad med mildt neutralt diskmedel och torka sedan av med en torr tygbit.

WARNING: Slå alltid av strömbrytaren och koppla ur PLEXTALK från el-uttaget före rengöring.

2.6.2. Batteriskötsel

För att få ut så mycket som möjligt ur ditt uppladdningsbara batteri bör du noga läsa följande punkter.

- Batteriet tar normalt 4 timmar att ladda fullt. När du använder din PLEXTALK för första gången eller efter en månad utan användning bör du ansluta den till en strömkälla och ladda i minst 24 timmar.
- Om PLEXTALK inte kommer att användas under en månads tid eller mer, ta ut batteriet och förvara det på en sval plats med låg luftfuktighet.
- Batterilivslängden beror på hur ofta det används och återuppladdas. Dess kapacitet att lagra elektrisk laddning minskar med tiden. När tiden för praktisk användning mellan varje uppladdning blir för kort behöver du ersätta batteriet med ett nytt. Dessa kan köpas från din lokala återförsäljare. Din återförsäljare kan också ge dig råd om återvinning och hantering av förbrukade batterier.
- Batterilivslängden kan påverkas av omgivande temperatur och miljö.

För att behålla batteriets prestanda bör följande procedur utföras var sjätte månad:

- Ladda batteriet fullt

- Köra enheten på batteri tills det tar slut
- Ladda upp

2.6.3. Märke med överkryssad soptunna.

Symbolen "överkryssad soptunna" finns tryckt på ytan på batteriet samt inuti batteriutrymmet.



Märk: Denna symbol gäller endast för EU-länder.

Denna symbol motsvarar direktiven 2006/66/EC. Denna symbol betyder att batterier och ackumulatörer skall hållas separat från annat avfall efter att de förbrukats. Om en kemisk symbol finns under symbolen ovan betyder denna kemiska symbol att batteriet eller ackumulatören innehåller tungmetall i en specifik koncentration som visas nedan.

Hg: Kvicksilver (0.0005%)

Cd: Kadmium (0.002%)

Pb: Bly (0.004%)

Dessa substanser kan orsaka skada på både människa och miljö om de inte tas omhand om på rätt sätt. Inom EU finns separata insamlingssystem för använda batterier och ackumulatörer. Var god se till att du lämnar in använda batterier och ackumulatörer på återvinningscentraler. Vår produkt är designad och tillverkad med batteri- och ackumulatörkomponenter som kan återvinnas eller återanvändas.

2.7. Slå på och av PLEXTALK

Du kan slå på eller av enheten genom att göra följande:

- Tryck ner och håll inne strömbrytaren tills enheten startar. När strömmen är på kommer den vänstra dioden att växla till orange och sedan grönt.

- Slå på strömbrytaren och håll den intryckt tills PLEXTALK är inställt på "spara batteriet." Håll strömbrytaren intryckt i ytterligare 3 sekunder för att stänga av PLEXTALK.

Märk. I läget "Spara Batteriet" sätter PLEXTALK igång igen så fort du trycker på en knapp eller tangent. Sedan anges klockslag.

Märk. När PLEXTALK är i läget "Spara Batteriet", urladdas batteriet gradvis.

Märk. Om strömbrytaren slagits av eller batteriet satts in igen eller utbytt, tar System-start eller omstart cirka 40 sekunder.

Märk: När du slår av enheten och inte håller ner strömbrytaren tillräckligt länge kommer funktionen automatisk avstängning att aktiveras.

Märk: Om knapplåset är på kommer strömbrytaren inte att fungera.

2.8. Funktionen knappbeskrivning

Precis som namnet anger, ger funktionen knappbeskrivning användaren en beskrivning av knapparna på PLEXTALK.

- Aktivera knappbeskrivningsläget genom att trycka ner och hålla inne Meny-knappen i ungefär 5 sekunder. När du nu trycker på någon knapp kommer enheten att ge en beskrivning om den samt dess funktioner.
- Inaktivera knappbeskrivningsläget genom att trycka ner och hålla inne Meny-knappen i ungefär 5 sekunder.

2.9. Funktionen knapplås.

Knapplås kan användas för att låsa knapparna och kontrollerna så att de inte aktiveras av misstag.

- För att aktivera knapplåset, tryck Låsknappen mot överkanten av enheten.
- För att låsa upp PLEXTALK, tryck Låsknappen mot nederkanten av enheten.

2.10. Sätta in och ta ut SD-kort

För sätta in ett SD-kort, gör följande:

- Slå av enheten.
- Håll SD-kortet så att det avkapade hörnet finns framme till höger. Med andra ord ska det avkapade hörnet vara närmast den nedre kanten på enheten.

- Sätt in SD-kortet i kortplatsen på enhetens vänstra kant.
- Tryck in kortet hela vägen i kortplatsen tills det klickar på plats och kortets kant ligger i nivå med ytan på enhetens vänstra kant. Använd inte onödig kraft när du gör detta.

För ta ut ett SD-kort, gör följande:

- Slå av enheten.
- Tryck in SD-kortet lite så att det klickar och fjädrar ut. SD-kortets ena kant skall hoppa ut en bit ur enheten.
- Ta försiktigt tag i kortet och dra ut det ur kortplatsen.

Observera: PLEXTALKs kortläsare är endast kompatibel med SD- och SDHC-kort. Om du sätter in andra minneskort såsom Memory Stick eller MMC kan spelaren sluta att fungera korrekt, undvik detta.

Märk: SD-kort har en liten låsknapp som låter dig skydda den lagrade datan om du vill. Den finns på vänster sida av kortet, på motsatt sida av det avkapade hörnet. Om knappen är i positionen mot den främre kanten av SD-kortet (den lite räfflade kanten på SD-kortet) kan du spela in samt radera information. Om knappen är i positionen från den främre räfflade kanten är datan på SD-kortet skyddad.

3. Introduktion till menysystemet

Man kan komma åt ett antal funktioner i PLEXTALK via det inbyggda menysystemet. Detta kapitel ger dig förståelse för hur menyn är uppbyggd samt hur du använder den.

3.1. Huvudmenyn.

Högsta nivån är huvudmenyn som har 7 objekt. Dessa är:

- Redigera - för att utföra enkel redigering av en Daisyinspelning.
- Inspelningsinställningar - låter dig välja från ett antal olika inspelningsinställningar eller för att ställa in dina egna anpassade inställningar.
- Uppspelningsinställning – låter dig höra den aktuella inställningen och ställa in hur namn på album eller spår ska anges.
- Bokmärke - låter dig specificera hur röstbokmärken spelas upp samt låter dig radera alla bokmärken.
- Röstanteckning - spela in korta röstanteckningar.
- Poddradio – hjälper dig att hålla listan med episoder aktuell och ladda ner avsnitt.
- Hantera lagringsmedia - ger dig mediainformation, färdigställa inspelade Daisyböcker, formatera media eller radera data från SD-kort.
- Systeminställningar – ger dig systeminformation för att kontrollera vad särskilda funktioner styr eller spelar.

3.2. Aktivera och navigera menyn

För att navigera runt i menyn, använd följande metoder:

- Aktivera menyn genom att trycka på Meny-knappen en gång.
- För att välja ett annat alternativ på samma nivå i menyn, tryck antingen Vänster för att flytta till vänster eller Höger för att flytta till Höger. När du flyttar till ett nytt menyalternativ kommer det att uttalas.
- Alla menyer fungerar så att om du fortsätter i samma riktning kommer du till slut fram till startpunkten i den menyn, då de är designade att gå runt i en cirkel.
- För att välja ett menyalternativ, tryck på knappen Ner eller Enter. Förutsatt att det finns en undermeny och att den går att komma åt vid det aktuella tillfället. Detta tar dig ner en nivå i menystrukturen och lämnar dig på den relevanta undermenyn.
- För att flytta upp en nivå i menyn, tryck på knappen Upp.
- För att lämna menysystemet direkt, oberoende av menynivå, tryck på Meny-knappen.

3.3. Genvägar för menyval

Du kan välja att skapa en genväg till ett specifikt menyalternativ via nummerknapparna.

För att skapa en genväg in ett specifikt menyalternativ, gör följande:

- Tryck på Meny-knappen och gå till menyalternativet som du vill skapa en genväg till.
- Medan du trycker ner och håller inne Meny-knappen ska du trycka på önskad nummerknapp tills du hör ett ljud som bekräftar valet. Sedan kommer PLEXTALK att skapa en genväg till det specifika menyalternativet på denna nummerknapp.

För att sedan gå till menyalternativet direkt gör följande:

- Medan du trycker ner och håller inne Meny-knappen, tryck ner nummerknappen med genvägen. Du kan sedan välja det specifika menyalternativet.

4. Ställa in din PLEXTALK

4.1. Ställ in din önskade talsyntes

Du har möjlighet att välja en av två röster för talsyntesen. För att välja önskad röst för talsyntesen, gör följande:

- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "systeminställningar" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd knapp Vänster eller Höger för att gå till "Välj talsyntesröst" och tryck Enter.
- Använd knapp Vänster eller Höger för att välja önskad röst och tryck Enter för att välja den. PLEXTALK kommer att göra detta till den nya standardinställningen samt lämna menysystemet.

Märk: Om du ändrar språk kommer PLEXTALK att göra en omstart.

4.2. Ställ in tonhöjden för talsyntesen

För att justera tonhöjden för den inbyggda talsyntesen, gör följande:

- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "systeminställningar" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "Inställning av tonhöjd för talsyntes" och aktivera det med Enter.
- Använd Vänster eller Höger för att välja din önskade inställning för tonhöjd i området -5 till +5 med 0 som normal inställning och bekräfta den genom att trycka Enter.

4.3. Ställ in datum och tid

För att ställa in datum och tid för den interna klockan, gör följande:

- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "systeminställningar" och aktivera det med knappen Enter.
- Välj alternativet "Ställ in datum och tid" ur menyn och tryck Enter.

- Använd nummerknapparna för att skriva in aktuellt år med 4 siffror och tryck Enter, eller tryck Enter direkt för att acceptera de aktuella inställningarna.
- Använd nummerknapparna för att skriva in aktuell månad med 2 siffror och tryck Enter, eller tryck Enter direkt för att acceptera de aktuella inställningarna.
- Använd nummerknapparna för att skriva in aktuell dag med 2 siffror och tryck Enter, eller tryck Enter direkt för att acceptera de aktuella inställningarna.
- Använd nummerknapparna för att skriva in den aktuella tiden med 4 siffror och tryck Enter. Använd inledande nollor när det är nödvändigt.
- Som en bekräftelse kommer datumet och tiden som du just ställt in att meddelas.

Märk: Om du skriver in felaktiga siffror kan du trycka på Avbryt för att rensa de inskrivna siffrorna.

Märk: För att kontrollera aktuellt datum och tid, tryck ner och håll inne knapp nummer 5.

4.4. Välj önskat vänteljud

När PLEXTALK är upptagen som när den läser ett media, spelas ett ljud som indikerar att en process utförs.

För att välja önskat vänteljud, gör följande:

- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "systeminställningar" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till alternativet "Välj vänteljud" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att lyssna på tillgängliga alternativ och tryck Enter när du befinner dig på vänteljudet som du önskar.

4.5. Välj Ljud för knapptryckning

Du kan välja mellan ljud för knapptryckning på eller av. För att välja ljud för knapptryckning, gör följande:

- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "systeminställningar" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "Välj ljud för knapptryckning" samt välj det genom att trycka Enter.

- Använd Vänster eller Höger knapp för att välja mellan "Ljud vid Knapptryckning På" eller "Ljud vid Knapptryckning Av". Bekräfta valet med Enter. PLEXTALK aktiverar din inställning samt gör en omstart.

5. Strömfunktioner

5.1. Varning vid låg batterinivå

När PLEXTALK drivs på batteriström och strömnivån går ner till en nivå där uppladdning behövs säger PLEXTALK "Låg batterinivå." Spelaren kommer att stänga av om en minut. Om du vill fortsätta att använda PLEXTALK måste du ansluta strömadaptern.

5.2. Funktionen energispar

För att spara batteriet går PLEXTALK över till läget "Spara Batteriet" efter 2 minuter även om batteriladdningen fortfarande är bra.

När PLEXTALK anslutits till elnätet eller USB-enhet, växlar PLEXTALK automatiskt över till läget "Spara Batteriet" efter 15 minuters inaktivitet.

5.3. Påtvingad avstängning

Om PLEXTALK av någon anledning inte stänger av eller du inte kan navigera med några knappar kan du prova en påtvingad avstängning som alternativ till att plocka ut batteriet.

För att använda funktionen påtvingad avstängning, tryck ner och håll inne strömbrytaren i mer än 10 sekunder, släpp sedan upp strömbrytaren. PLEXTALK kommer att slå av.

Märk: Om denna metod inte fungerar och din PLEXTALK fortfarande är igång kan du dra ut strömadaptern samt ta ut batteriet och sätta in det igen.

5.4. Automatisk avstängning

Funktionen Automatisk avstängning låter dig specificera tiden efter vilken PLEXTALK ska stänga av.

5.4.1. Ställa in Automatisk avstängning

För att ställa in automatisk avstängning, gör följande:

- Tryck snabbt och släpp upp strömbrytaren en gång. PLEXTALK kommer att säga "Automatisk avstängning. 15 minuter. Inställt."
- Tryck och släpp upp strömbrytaren igen för att öka tiden för den automatiska avstängningen. Tiden för den automatiska avstängningen ökar på detta sätt: 30 minuter, 45 minuter, 1 timme, 1 timme och 30 minuter samt 2 timmar vid varje tryckning.

5.4.2. Avbryt Automatisk avstängning

För att inställa automatisk avstängning, gör följande:

- Tryck snabbt och släpp upp strömbrytaren en gång. PLEXTALK meddelar att den automatiska avstängningen är på och antalet minuter som återstår innan enheten stänger av.
- Tryck upprepade gånger på strömbrytaren tills PLEXTALK säger "Av".

6. Uppspelningsfunktioner gemensamma för alla format

PLEXTALK kan spela följande format:

- DAISY-böcker
- Musik: MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ och Ogg Vorbis.
- Textfiler: ASCII-TEXT format, Microsoft Word .doc, .docx eller HTML-format.
- Audio-böcker: Audible, MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ and Ogg Vorbis..
- Poddradio
- Webbradio

Märk: Om en CD har flera sorters innehåll, till exempel, Daisyfiler och ljudfiler kommer PLEXTALK endast att identifiera en typ av innehåll.

Märk: Wordfiler och WMA-filer på externa USB CD/DVD-enheter går ej att spela upp.

6.1. Starta och stoppa uppspelningen

För att starta eller stoppa uppspelningen, gör följande:

- För att påbörja uppspelningen, tryck på knappen Start/Stop. PLEXTALK kommer att återuppta uppspelningen från positionen där den stoppades tidigare.
- För att stoppa uppspelningen, tryck på knappen Start/Stop.

6.2. Snabbspolning framåt och bakåt

Funktionerna för snabbspolning framåt och bakåt använder Pil Vänster och Pil Höger på var sin sida om start/stopknappen.

- För att spola tillbaka, tryck ner och håll inne Pil Vänster. Uppspelningen kommer att starta när du släpper knappen.
- För att spola framåt, tryck ner och håll inne Pil Höger. Uppspelningen kommer att starta när du släpper knappen.

Om du vid uppspelning av DAISY-bok eller audio-fil håller ner Pil Vänster eller Pil Höger, Hoppa snabbspolningen bakåt eller framåt 5 sekunder, 10 sekunder, 20 sekunder, 30 sekunder, 1 minut, 2 minuter, 3 minuter osv. Om du släpper upp knappen innan PLEXTALK sagt "1 minut", fortsätter uppspelningen från och med den punkt där du släppte upp knappen.

Märk. Man kan inte spola framåt eller bakåt när man lyssnar på webbradion.

6.3. Ändra volymen för uppspelning

Volymen kan ställas in med 1 steg i taget på en skala från 0 till 25 där 0 är tyst och 25 är högsta volymen. Volymen på guiderösten justeras också samtidigt som uppspelningsvolymen.

- För att öka volymen vid uppspelning, tryck antingen volymkontrollen uppåt upprepade gånger för att öka volymen en nivå i taget eller tryck uppåt och håll inne volymkontrollen tills volymen nått önskad nivå.
- För att minska volymen vid uppspelning, tryck antingen volymkontrollen neråt upprepade gånger för att minska volymen en nivå i taget eller tryck ner och håll inne volymkontrollen tills volymen nått önskad nivå.

6.4. Ändra hastigheten för uppspelning

Det finns 11 hastighetsinställningar från -2 till +8, som kan justeras 1 nivå i taget. Normal hastighet är i position 0. -2 är halv normal hastighet, + 4 är dubbel normal hastighet och +8 är trippel hastighet.

- För att öka hastigheten för uppspelning, tryck på knapp 1 en gång och sedan på knappen Upp.
- För att minska hastigheten för uppspelning, tryck på knapp 1 en gång och sedan på knappen Ner.

Märk: Om du trycker ner och håller inne knappen Upp eller Ner kommer hastigheten snabbt att ändras i den valda riktningen.

Märk. Man kan inte ändra webbradions uppspelningshastighet.

6.5. Ändra tonläget för ljudet

Det finns 13 inställningar för tonläge från -6 till +6, som kan justeras 1 nivå i taget.

- För att öka tonläget, tryck på knapp 1 två gånger och sedan på knappen Upp.
- För att minska tonläget, tryck på knapp 1 två gånger och sedan på knappen Ner.

Märk: Om du trycker ner och håller inne knappen Upp eller Ner kommer tonläget snabbt att ändras i den valda riktningen.

6.6. Ändra volymen för guiderösten

Volymen för guiderösten kan ändras. Det finns 11 volyminställningar från minus 5 till plus 5 som kan justeras 1 nivå i taget. För att ställa in volymen för guiderösten, gör följande:

- Tryck på knapp 1 tre gånger.
- Tryck Pil Upp för att öka guidevolymen eller Pil Ner för att minska den.

Märk: När uppspelningsvolymen ändras, ändras även volymen för Guiderösten i på samma sätt så att den inbördes skillnaden mellan dem bevaras.

6.7. Ändra hastighet för guideröst

Hastigheten för guiderösten kan ändras separat från uppspelningshastigheten. Det finns 11 hastighetsinställningar från -2 till +8, som kan justeras 1 nivå i taget. För att ställa in hastigheten för guiderösten separat, gör följande:

- Tryck på knapp 1 fyra gånger.
- Tryck Pil Upp för att öka hastigheten för guiderösten eller Pil Ner för att minska hastigheten för guiderösten.

6.8. Aktivera navigationsmenyn

En av de mest användbara funktionerna i PLEXTALK är möjligheten att välja hur du vill navigera. För att använda navigationsmenyn, gör följande:

- Använd Pil Upp eller Ner för att flytta uppåt eller neråt i navigationsmenyn. Objekten som läses upp är alternativen som finns tillgängliga i navigationsmenyn vid det aktuella tillfället.
- Efter att du valt önskad navigationsmetod kan du använda Vänster eller Höger knapp för att flytta bakåt eller framåt i din valda navigationsnivå.
- Till exempel, när du använder den inbyggda användarmanualen och väljer alternativet "nivå 1" kommer du att flyttas framåt och bakåt mellan rubriker på nivå 1 om du trycker på Pil Vänster och Pil Höger.

6.9. Välj media och bok.

Ibland vill man växla från SD-kort till USB-medium eller tvärt om. Du kan göra detta på följande sätt:

- Tryck på knappen Titel upprepade gånger tills önskat medium läses upp. PLEXTALK kommer att växla mellan 3 tillgängliga alternativ, "SD-kort", "USB" och "Röstanteckning".
- Efter att önskat media har meddelats, tryck Vänster eller Höger för att flytta till nästa tillgängliga innehåll på det mediet.
- När du hittat ett objekt som du önskar spela upp, tryck på knappen Start/Stop och uppspelningen kommer att fortsätta där den sist avbröt i det aktuella objektet.

6.10. Navigation efter titel

I situationer när det finns flera objekt på SD-kortet eller USB-mediumet kan det tänkas att du vill växla från objektet som du läser till ett annat.

För att spela dina favoriter kan du välja under "Kategori", "Mapp", "Titel" eller "Fil." Under "Kategori" hittar du "DAISY-bok", "Musik", "Text", "Audio-bok", "Poddradio", samt "Webbradio."

För att navigera från titel till titel, gör så här:

- Tryck på knappen "Titel" ett antal gånger tills du kommer till den typ av media du vill ha.
- Tryck på Pil Upp eller Pil Ner för att välja från nivåerna "kategori", "mapp", "titel" eller "fil".
- Tryck på Pil Vänster eller Pil Höger för att navigera från det ena valet till det andra på önskad nivå.
- Om du valde att navigera från mapp till mapp eller från kategori till kategori för att hitta en viss fil eller titel, tryck på Pil Ner en eller två gånger för att komma till titelnivån. PLEXTALK säger "välj titel". Använd Pil Vänster och Pil Höger för att hitta den titel du vill spela.
- Väljer du att navigera inom nivåerna "titel" eller "fil", kan du gå direkt till den titel eller fil du helst vill höra.
- Tryck på knappen Start/Stop för att spela boken. Uppspelningen startar från det ställe där den sist stängdes av.

Så här söker du efter din favoritmusik under kategorin "Musik"

Du kan bestämma hur mycket som ska spelas upp från "Spår", "Album", "Mappar", eller "All musik" under kategorin "Musik". För att ställa in musikspår, välj ut ett favoritspår från nivån "Fil" och tryck på Enter. För att ställa in uppspelning på "Album", välj ett favoritalbum från nivån "Titel" och tryck på Enter. För att ställa in uppspelningen på mapp, välj den mapp du vill ha under nivån "Mapp" och tryck på Enter. När du valt ut en mapp från mappnivån och sedan tryckt på Enter, blir alla album under mappnivån tillgängliga för uppspelning.

För att spela all musik har du två möjligheter. Välj "Musik" från nivån "Kategori" och tryck på Enter. Du kan också välja "All musik" från nivåerna Mapp eller Titel och trycka på Enter.

Under "Uppspelningsinställningar" kan du välja "Upprepad" eller "Slumpvis" för det val du gjorde genom att trycka på Enter.

Märk. Filnavigering är möjlig under "Musik", "Audio-bok" samt "Poddradio", men inte under andra kategorier.

Märk. Talböcker från Audible kan man inte nå genom filnavigering.

6.11. Hoppa direkt till en bok

Gör så här om du vill hoppa direkt till en bok:

- Tryck på Titel-knappen flera gånger tills du hör den mediabeteckning du vill gå till.
- Tryck på Pil Upp eller Pil Ner för att välja nivån "Kategori".
- Tryck på Pil Vänster eller Pil Höger för att välja önskad kategori.
- Skriv siffran för den titel du vill gå till och tryck på Enter.
- Tryck på Enter en gång till för att spela titeln.

6.12. Ändra titlarnas sorteringskriterier

När du ska välja ut en titel kan du ställa in hur titlarna ska sorteras. Du har tre olika sorteringskriterier att välja bland: "Lista med alla böcker", "Lista med tidigare böcker", samt "Lista på nya titlar".

- Lista med alla böcker: Alla mappar och filer är alfabetiskt sorterade i bokstavsordning.
- Lista med tidigare böcker: Här sorteras titlarna enligt det datum då de senast spelades.
- Lista på nya titlar: Här sorteras titlarna enligt sina tidsstämplar.

Gör så här för att höra de senast avlyssnade titlarna:

- Tryck på Titel-knappen en gång.
- Tryck på knappen "Gå till" upprepade gånger för att välja "Lista med tidigare böcker".
- Använd Pil Upp och Pil Ner för att välja mellan "Kategori" och "Titel" och använd Pil Vänster eller Pil Höger för att gå till önskad titel. Tryck sedan på Enter för att börja uppspelningen.
- Alternativt kan du mata in numret på den önskade titeln och trycka på Enter för att välja den. Tryck sedan på Enter en gång till för att påbörja uppspelningen.

Märk. PLEXTALK kan hålla upp till 10 titlar inom varje kategori i minnet.

6.13. Få information om media och bok.

För att få information om det aktuella mediet samt bok, gör följande:

- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "Hantera lagringsmedia" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "Bokinformation för lagringsmedia." och aktivera det med knappen Enter.
- PLEXTALK kommer att meddela information om det aktuella mediet samt boken.
- När du har hört klart informationen, tryck Enter för att lämna menysystemet.

6.14. Meddela aktuell status.

Du kan få en mängd information om den aktuella statusen, om rubriker, sidor, bokmärken och så vidare. Oberoende om PLEXTALK spelar eller inte, gör följande:

- Tryck på knapp 5 en gång.
- Information kommer att läsas upp.
- Om du inte vill lyssna på all information utan hoppa mellan enskilda objekt på ett snabbt sätt kan du göra detta genom att trycka på knapp 5 upprepade gånger.
- Om du har hört det du vill höra kan du stoppa den upplästa informationen genom att trycka på Enter.
- Tryck ner och håll inne knapp 5 för att höra aktuell tid och datum.

6.15. Välj uppspelningsläge

För att välja något av uppspelningslägena slumpvis uppspelning och upprepa, gör följande:

- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "Uppspelningsinställningar" och aktivera det med Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "Inställningar för slumpvis uppspelning samt upprepning" och aktivera det med Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att välja önskat uppspelningsläge och aktivera det med knappen Enter.

6.16. Använda bokmärken

6.16.1. Bokmärkestyper

Det finns 3 typer av bokmärken som du kan använda i PLEXTALK, nämligen följande:

- Numrerade bokmärken – du kan lägga in upp till 10000 numrerade bokmärken. Varje bokmärke får ett unikt nummer mellan 1 till 65000.
- Röstbokmärken – dessa är numrerade bokmärken som har tillhörande röstinspelningar. Röstbokmärken använder minne. Det totala utrymmet i minnet ger ungefär 30 minuter inspelningstid. Om du försöker överstiga denna begränsning så kommer det äldsta bokmärket automatiskt att raderas innan nya skapas.
- Automatiska bokmärken – för varje bok, album eller textfil sparas den aktuella spelpositionen automatiskt så att uppspelningen kan återupptas från den senaste positionen nästa gång boken, albumet eller textfilen spelas. Automatiska bokmärken läggs in automatiskt av PLEXTALK när du flyttar till en annan bok, album eller fil eller när du stänger av spelaren. Du behöver inte göra någonting för att detta skall fungera.

Märk: PLEXTALK sparar automatiska bokmärken och annan information för upp till 1000 böcker, album eller textfiler.

6.16.2. Lägga in bokmärken

Du kan lägga in ett numrerat bokmärke, oberoende på om PLEXTALK spelar eller inte, genom att göra följande:

- Tryck på Bokmärkesknappen två gånger.

- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret som du vill ge detta bokmärke. Om du låter PLEXTALK ange ett nummer ska du inte skriva in ett nummer eller skriva in "0".
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.

Märk: När du låter PLEXTALK tilldela numret väljer PLEXTALK det minsta möjliga icke upptagna numret.

Du kan lägga in ett röstbokmärke, oberoende på om PLEXTALK spelar material eller inte, genom att göra följande:

- Tryck på Bokmärkesknappen två gånger.
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret som du vill ge detta röstbokmärke. Om du låter PLEXTALK ange ett nummer ska du inte skriva in ett nummer eller skriva in "0".
- Tryck på Inspelningsknappen för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.
- Tryck ner och håll inne Inspelningsknappen och läs in ditt röstmeddelande.
- Släpp upp Inspelningsknappen när du är klar. PLEXTALK kommer att bekräfta att röstbokmärket har lagts in.

6.16.3. Navigera till bokmärken

Du kan hoppa till ett numrerat bokmärke eller Röstbokmärke, oberoende på om PLEXTALK spelar material eller inte, genom att göra följande:

- Tryck på Bokmärkesknappen en gång.
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på bokmärket som du vill gå till.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.
- När du skrivit in ett giltigt nummer kommer PLEXTALK att flytta till positionen för bokmärket och starta uppspelningen automatiskt.

Så snart du har lagt in bokmärken i en bok, album eller fil kommer navigationsmenyn "bokmärke" att bli tillgänglig. Du kan navigera till nästa bokmärke med ett lägre eller högre nummer, genom att göra följande:

- Använd knappen Upp eller Ner för att gå till alternativet "bokmärke" i navigationsmenyn.
- Tryck på Pil Vänster för att flytta till nästa bokmärke med ett lägre nummer. Uppspelningen startar automatiskt.

- Tryck på Pil Höger för att flytta till nästa bokmärke med ett högre nummer. Uppspelningen startar automatiskt.

6.16.4. Radera bokmärken

För att radera ett numrerat bokmärke eller ett röstbokmärke, gör så här:

- Tryck på Bokmärkesknappen tre gånger.
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på bokmärket som du vill radera.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.
- När du bekräftar handlingen kommer PLEXTALK att ta bort det specifika bokmärket ur den aktuella boken eller albumet samt bekräfta detta med ett meddelande.

Du kan radera alla bokmärken i den aktuella boken, albumet eller filen, genom att göra följande:

- Tryck på Meny-knappen för att aktivera huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "bokmärke" och aktivera med Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "radera alla bokmärken i aktuell bok" och tryck Enter.
- PLEXTALK kommer att be dig bekräfta denna handling. Om du vill fortsätta, tryck Enter och PLEXTALK kommer att säga "raderad".

Märk: Processen kommer endast att radera bokmärken i den aktuella boken eller filen och kommer inte att påverka bokmärken i andra böcker.

6.16.5. Inställning för uppspelning av röstbokmärken

När du använder röstbokmärken har du möjlighet att välja om du vill höra dem uttalas eller inte under uppspelning. Du kan slå på eller av uppläsningen av röstbokmärken, genom att göra följande:

- Tryck på Meny-knappen för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "bokmärke" och aktivera det med Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "inställning för uppspelning av röstbokmärken" och aktivera det med Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att välja antingen "röstbokmärke på" eller "röstbokmärke av" och tryck Enter för att bekräfta ditt val.

6.17. Gruppering av filer och mappar i PLEXTALK

När PLEXTALK hanterar vad som finns på SD-kort eller USB-media, klassificeras innehållet automatiskt inom grupperna "DAISY-titlar", "Inspelningar", "Musik", "Text", "Ljudbok", "Poddradio", samt "Webbradio", oavsett var på kortet eller USB-minnet filen finns. När du sedan navigerar bland filerna kommer de redan att ligga ordnade för dig oberoende av var de fysiskt ligger på mediumet.

Till exempel, om du har 3 textfiler i rotmappen och 2 till i en undermapp kommer PLEXTALK att se dessa filer som 5 textfiler lagrade i 2 mappar.

Om det finns olika typer av innehåll såsom Daisyböcker, ljudfiler eller textfiler kommer PLEXTALK automatiskt att sortera dem efter typ och namn.

7. Spela Daisyböcker

Detta kapitel beskriver ytterligare funktioner som kan användas när du spelar upp en Daisybok.

7.1. Navigering efter rubriker

Det finns 2 sätt att navigera till rubriker inom en Daisybok. Du kan antingen gå direkt till en rubrik eller så kan du förflytta dig mellan tillgängliga rubriker en i taget.

För att gå direkt till en specifik rubrik, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till två gånger.
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på rubriken som du vill gå till.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.

För att navigera mellan rubriker i en följd, med hjälp av rubriknivåerna, gör följande:

- Använd knappen Upp eller Ner för att välja önskad rubriknivå för navigation, till exempel nivå 1, nivå 2 etc.
- Tryck på Pil Vänster för att flytta bakåt till föregående rubrik på den valda nivån.
- Tryck på Pil Höger för att flytta framåt till nästa rubrik på den valda nivån.

Märk: När du navigerar på detta sätt kommer PLEXTALK att stanna vid alla rubriker som ligger på samma nivå eller en högre än den nivå som du har valt. Till exempel, om du har valt att navigera på nivå 3 hittar PLEXTALK alla rubriker på nivå 1, nivå 2 och nivå 3 när du flyttar bakåt eller framåt.

7.2. Flytta till början eller slutet i en Daisyboken

För att flytta till början av en Daisybok, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till två gånger.
- Tryck på knappen Enter och uppspelningspositionen kommer att flyttas till början av den aktuella boken.

För att flytta till slutet av en Daisybok, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till två gånger.
- Tryck på knappen 0 följt av Enter och uppspelningspositionen kommer att flyttas till slutet av den aktuella boken.

7.3. Navigering efter sidor

Navigering efter sidor är väldigt lik navigering efter rubriker.

För att gå direkt till en specifik sida, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till en gång.
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på sidan som du vill gå till.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.

För att navigera efter sidor i en följd, gör följande:

- Använd knappen Upp eller Ner för att gå till alternativet "sida" i navigationsmenyn.
- Tryck på Pil Vänster för att gå bakåt till föregående sida.
- Tryck på Pil Höger för att gå framåt till nästa sida.

Märk: Om det inte finns några sidomarkeringar i boken kommer alternativet "sida" inte att visas i listan i navigationsmenyn.

7.4. Navigering efter grupp

Du kan flytta bakåt eller framåt en grupp i taget, genom att göra följande:

- Använd knappen Upp eller Ner för att gå till alternativet "grupp" i navigationsmenyn.
- Använd Pil Vänster för att flytta bakåt till den föregående gruppen i boken.
- Använd Pil Höger för att flytta framåt till nästa grupp i boken.

Märk: Om det inte finns några gruppmarkeringar i titeln kommer alternativet "grupp" inte att visas i listan i navigationsmenyn.

7.5. Navigering efter fras

För att flytta bakåt eller framåt en fras i taget, gör följande:

- För att flytta tillbaka en fras, tryck på knappen Upp eller Ner för att välja alternativet "fras" i navigationsmenyn och tryck sedan på Pil Vänster en gång.
- För att flytta framåt en fras, tryck på knappen Upp eller Ner för att välja alternativet "fras" i navigationsmenyn och tryck sedan på Pil Höger en gång.

7.6. Snabbhopp på 10 minuter, snabbhopp på 30 sekunder

Gör följande för att snabbhoppa 10 minuter eller 30 sekunder när du lyssnar på DAISY Audio:

- Använd Pil Upp eller Pil Ner för att välja 10 minuter respektive 30 sekunder.
- Tryck på Pil Höger för att hoppa framåt 10 minuter eller 30 sekunder beroende på vilket alternativ du valde.
- Tryck på Pil Vänster för att hoppa bakåt 10 minuter eller 30 sekunder beroende på vilket alternativ du valde.

7.7. Navigering efter skärm, stycke, rad, mening, bokstavering, ord eller tecken i Daisy textläge

Utöver de vanliga navigationsalternativen i Daisy har Daisy textfiler även alternativen "Skärm", "Stycke", "Rad", "Mening", "Bokstavera", "Ord" och "Tecken". Dessa alternativ blir automatiskt tillgängliga i navigationsmenyn när du använder denna typ av fil. För att navigera efter något av dessa alternativ, gör följande:

- Använd Pil Upp eller Ner för att välja önskad navigeringsmetod bland skärm, stycke, rad, mening, bokstavera, ord samt tecken.
- Använd Pil Vänster för att flytta bakåt i filen den valda mängden text.
- Använd Pil Höger för att hoppa framåt i filen den valda mängden text.

Märk: "Skärm" betyder 40 rader.

Märk: Navigationsalternativet bokstavera meddelar varje ord och bokstaverar det sedan.

7.8. Navigering efter procent

Du kan navigera efter procent i en fil. För att navigerar efter procent, gör följande:

- Tryck på knappen Gå Till tre gånger.
- Skriv in en procentenhet mellan 0 och 100 och tryck Enter.
- PLEXTALK kommer att flytta uppspelningspositionen till den nya positionen i filen.

7.9. Uppspelningssläge

Du kan välja mellan 2 olika uppspelningsslägen när du lyssnar på en Daisybok. De tillgängliga alternativen är följande:

- Standarduppspelning – det spelar genom boken och stannar när den är klar.
- Upprepa titel – den aktuella boken kommer att upprepas kontinuerligt tills uppspelningen stoppas.

7.10. Uppspelningsinställning för Multimedia DAISY

Multimedia DAISY är ett DAISY-format som innehåller både ljud- och textfiler. Vid uppspelning av Multimedia Daisy kan du bestämma vilket av dessa format PLEXTALK ska spela.

- Välj Multimedia DAISY-titel.
- Tryck på Meny-knappen.
- Använd Pil Vänster och Pil Höger för att komma till inställningen "Uppspelningsinställningar" och tryck på Enter.
- Använd Pil Vänster och Pil Höger för att komma till inställningen "Inställning för Multimedia DAISY" och tryck på Enter.
- Använd Pil Vänster och Pil Höger för att välja antingen "Ljud" eller "Text" och tryck sedan på Enter.

8. Lyssna på "inspelningar"

DAISY-titlar sorteras under kategorin "Inspelningar" i mappen "PlexRecording".

Inspelade titlar sparas automatiskt i mappen "PlexRecordings" in din PLEXTALK.

Uppspelning av "Inspelningar" sker på samma sätt som för DAISY-titlar.

Märk. Vid säkerhetskopiering av "Inspelningar" från SD-kort till USB-minne, sparas säkerhetskopieringen till mappen "PlexBackup" på USB-minnet. Därför sorteras de säkerhetskopierade titlarna inte in under "Inspelningar", utan under "DAISY-titlar."

9. Spela upp ljudfiler eller musikskivor

Detta kapitel beskriver funktionerna som är specifika vid uppspelning av ljudfiler eller musikskivor. PLEXTALK kan spela följande ljudfiler:

- Mp3-filer; MPEG1 Layer 3 från 32kbps till 320kbps och MPEG2 Layer 3 från 16kbps till 160kbps.
- Wave-filer.
- WMA-filer; PLEXTALK har inte stöd för DRM-skyddade WMA-filer.
- AMR-WB+
- Ogg Vorbis; från 45kbps till 320kbps

Observera: PLEXTALK kan inte spela musikskivor som inte följer CD digital audio-standard (CD-DA), såsom kopieringsskyddade musikskivor.

Märk: PLEXTALK kan inte användas för att spela in eller redigera ljudfiler på SD-kort eller USB-medium.

Märk: WMA-filer på extern USB-CD/DVD-media går ej att spela.

9.1. Navigering efter spår

Du kan antingen gå direkt till ett spår eller så kan du förflytta dig mellan tillgängliga spår ett i taget.

För att gå direkt till ett specifikt spår, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till en gång.
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på spåret som du vill gå till.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.

För att navigera efter spår i en följd, gör följande:

- Använd knappen Upp eller Ner för att gå till alternativet "spår" i navigationsmenyn.
- Tryck på Pil Vänster för att gå bakåt till föregående spår.
- Tryck på Pil Höger för att gå framåt till nästa spår.

Märk: När du flyttar bakåt ett spår i taget men låter spåret spela i mer än 3 sekunder så kommer du att hoppa till början av det aktuella spåret nästa gång du trycker för att flytta bakåt ett spår. Om du trycker bakåt ytterligare en gång inom 3 sekunder kommer du att flytta till föregående spår.

9.2. Navigering efter album

Du kan antingen gå direkt till ett album eller så kan du förflytta dig mellan tillgängliga album ett i taget.

För att gå direkt till ett specifikt album, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till en gång.
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på albumet som du vill gå till.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.

För att navigera efter album i en följd, gör följande:

- Tryck på knappen Upp eller Ner och välj "album" i navigationsmenyn.
- Tryck på Pil Vänster för att gå bakåt till föregående album.
- Tryck på Pil Höger för att gå framåt till nästa album.

9.3. Snabbhopp på 10 minuter, snabbhopp på 30 sekunder

Gör så här för att snabbhoppa 10 minuter eller 30 sekunder:

- Använd Pil Upp eller Pil Ner för att välja 10 minuter respektive 30 sekunder.
- Tryck på Pil Höger för att hoppa framåt 10 minuter eller 30 sekunder beroende på vilken intervall du valde.
- Tryck på Pil Vänster för att hoppa bakåt 10 minuter eller 30 sekunder beroende på vilken intervall du valde.

9.4. Uppspelningsläge

När du spelar ljudfiler kan du välja ett antal olika uppspelningslägen. De tillgängliga alternativen är följande:

- Standarduppspelning; den spelar det aktuella albumet och stannar när den är klar.
- Upprepa spår; det aktuella spåret kommer att upprepas kontinuerligt tills uppspelningen stoppas.
- Upprepa album; det aktuella albumet kommer att upprepas kontinuerligt tills uppspelningen stoppas.
- Upprepa alla album – Upprepa all den musik som valdes vid titelnavigeringen.

- Slumpvis uppspelning med upprepning – Slumpvis upprepning av all den musik som valdes vid titelnavigeringen.

9.5. Meddelar album och spår vid namn eller nummer.

När man navigerar efter album eller spår meddelar PLEXTALK album eller spår vid sitt namn eller nummer. Man kan välja om namn eller nummer skall meddelas. För att ändra denna inställning, gör följande:

- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "Uppspelningsinställningar" och aktivera det med Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "Läser namn på ljudfil" och aktivera det med Enter.
- Använd knapp Vänster eller höger för att välja mellan "Läs namn på ljudfil" och "läs nummer för ljudspår" och välj det genom att trycka Enter.

9.6. Spelordning för filer och mappar

Detta avsnitt ger dig information om spelordningen som används för filer och mappar.

- Uppspelning av filer – PLEXTALK kommer att spela upp filerna i samma ordning som deras filnamn organiseras.
- Uppspelning av mappar – om mer än en mapp finns på SD-kortet eller USB-mediumet kommer ljudfilerna att spelas i samma ordning som mapparna namn organiseras.

9.7. Begränsningar i ljudfiler

Restriktioner för antal filer och mappar:

- Maximalt antal filer som kan lagras i en mapp är 1024. Filer som överstiger 1024 identifieras inte.
- Maximalt antal filer som kan lagras i en mapp är 6000. Filer som överstiger 6000 identifieras inte.
- Maximalt antal mappar är 1024, inklusive rotmappen. Mappar som överstiger 1024 identifieras inte.
- PLEXTALK behandlar mappar som album och klarar av upp till 8 nivåer inklusive roten.

- Om en mapp innehåller en Daisybok söker inte PLEXTALK efter andra objekt i mappen eller i någon djupare mappnivå i mappen.

Märk: När det finns ett stort antal mappar kan det ta längre tid för PLEXTALK att läsa information från ett SD-kort eller USB-medium.

10. Spela upp textfiler

PLEXTALK kan spela upp textfiler med hjälp av talsyntes-röster. PLEXTALK har support för textfiler av följande typ:

- ASCII-text
- Microsoft Word-filer .doc, .docx
- HTML-filer

Märk: Wordfiler på extern USB-CD/DVD-media går ej att spela.

10.1. Navigera efter skärm, stycke, rad, mening, bokstavera, ord eller tecken

I textfiler finns alltid navigationsalternativen "Skärm", "Stycke", "Rad", "Mening", "Bokstavera", "Ord" och "Tecken". Dessa alternativ visas automatiskt i navigationsmenyn när du använder denna typ av fil. För Word och html-filer som har kodats med rubriker får du ett ytterligare navigationsalternativ i navigationsmenyn. Detta kallas "Nivå". För att navigera efter något av dessa alternativ, gör följande:

- Använd Pil Upp eller Ner för att välja önskad navigeringsmetod bland skärm, stycke, rad, mening, bokstavera, ord samt tecken.
- Använd knapp Vänster för att hoppa bakåt med vald navigationsenhet.
- Använd knapp Höger för att hoppa framåt med vald navigationsenhet.

Märk: "Skärm" betyder 40 rader.

Märk: Navigationsalternativet bokstavera meddelar varje ord och bokstaverar det sedan.

10.2. Navigering efter procent

I textfiler kan du navigera via procent. För att navigerar efter procent, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till en gång.
- Skriv in en procentenhet mellan 0 och 100 och tryck Enter.
- PLEXTALK kommer att förflytta uppspelningspositionen till den nya positionen i textfilen.

10.3. Uppspelningssläge

Precis som för Daisyböcker och ljudfiler kan du välja uppspelningsläge för textfiler. De tillgängliga alternativen är följande:

- Standarduppspelning; den spelar genom boken och stannar när den är klar.
- Upprepa titel; den aktuella boken kommer att upprepas kontinuerligt tills uppspelningen stoppas.

11. Spela ljudböcker.

Det går att spela AUDIO-böcker på PLEXTALK. PLEXTALK har support för följande typer av ljudfiler:

- Filer med ändelsen ".aa" från Audible.
- Filer av typ MP3, WMA, WAVE, AMR, samt Ogg Vorbis.

Skapa en mapp med namnet "Audible" i SD-kortets rotkatalog och spara .aa-filerna i den mappen. Skulle mappen "Audible" innehålla filer med annan filändelse än .aa, ignoreras de av PLEXTALK. PLEXTALK behandlar en .aa-fil som en Audio-boktitel. Det betyder att man kan slå fram .aa-filer under Titelnavigering, men inte under Filnavigering.

Därför ska du i SD-kortets rotkatalog skapa mappen "PlexAudioBook" där du sparar alla Audiobok-filer som inte har filändelsen .aa.

Alla audio-filer som lagrats i mappen "PlexAudioBook" behandlas vid uppspelning som audioböcker, inte som musik. Om mappen "PlexAudioBook" innehåller en eller flera mappar, behandlar PLEXTALK dessa som audioboktitlar.

Märk. PLEXTALK identifierar .aa-filer även om de inte ligger i Audible-mappen.

Emellertid rekommenderar vi att du sparar .aa-filer i Audible-mappen.

Märk. Skulle .aa-filer ha lagrats i mappen "PlexAudioBook" ignorerar PLEXTALK dem.

Navigering inom audioböcker är exakt identisk med vad som gäller för musikfiler.

Se avsnitt 9, "Uppspelning av Audio-filer eller musik-Cd-skivor" för ytterligare information.

Märk. Det är möjligt att vid val av .aa audio-filer hoppa från rubrik till rubrik eller enligt procentintervaller.

Märk. Under inställningarna för slumpvis och upprepad uppspelning har man alternativen "standarduppspelning" och "Upprepa titel" att välja mellan.

12. Poddradio

Poddradion är baserad på "Personal on demand broadcast," (Podcast), teknologi man kan använda för att ladda ner audio-filer från exempelvis musiksajter. När du väl programmerat in de poddradio-sajter du vill ha i PLEXTALK, kan du ladda ner de aktuella audio-filerna från en sändningsserie. Hädanefter kallar vi en audio-fil som förmedlas genom poddradio för "episod."

Märk. Se avsnitt 20, "Nätverksfunktion" för anvisningar rörande nätverksinställningar.
Märk. Det är bara episoder i form av audio-filer som kan laddas ner till PLEXTALK.

12.1. Lägg till poddradio i PLEXTALK

Om du vill lyssna på poddradio, måste du själv lägga in vilka poddradiosändningar du vill ha. Först ska du skapa en fil med filändelsen .opml (hädanefter kallad "opml-fil"). Du kan skapa den här filen på din dator och mata in alla dina favoritsändningar från poddradion i filen. Skapa sedan en mapp med namnet "PlexPodcast" i SD-kortets rotkatalog och spara opml-filerna i den mappen. Du kan skapa en opml-fil på två sätt:

< Du kan gå till PLEXTALKs webbsajt och hämta ner avsedd programvara >
Du kan ladda ner en programvara som innehåller instruktionsboken från PLEXTALKs webbsajt och i instruktionsboken läsa om hur man skapar opml-filer.

< Använd en programvara som exempelvis iTunes >
Du kan exportera de poddradiosändningar du vill ha till en opml-fil med hjälp av en programvara som iTunes. För att exportera en opml-fil, se programvarans instruktionsbok.

12.2. Lyssna på poddradio för första gången

Gör så här för att ladda ner och lyssna på en poddradiosändning för första gången:

- För in SD-kortet med opml-filen i PLEXTALK
- Tryck på knappen Titel upprepade gånger för att välja SD-kortet.
- Använd Pil Upp för att välja "Kategori, och tryck sedan på antingen Pil Vänster eller Pil Höger för att välja "Poddradio."
- Använd Pil Ner för att välja "Titel", och tryck sedan på Pil Vänster eller Pil Höger för att välja den poddradiosändning du vill ha. Tryck på Enter när du gjort ditt val.

- Vid första nedladdningen frågar PLEXTALK om du vill uppdatera listan med episoder trots att det inte finns någon lista med episoder ännu. Tryck på Enter för att börja uppdatera listan med episoder.
- Välj önskad episod från den uppdaterade listan och tryck på Start/Stopp-knappen.
- PLEXTALK frågar om du vill ladda ner filen. Tryck på Enter för att ladda ner den.
- Nedladdningen kan ta tid. När filen laddats ner kan du trycka på Start/Stopp-knappen för att lyssna.

Märk. Se avsnitt 12.7, "Nedladdningsinformation" för detaljer om vad PLEXTALK säger medan nedladdning pågår.

12.3. Spela poddradio

För att lyssna på en episod som du laddat ner från listan, gör så här:

- Tryck på knappen Titel upprepade gånger för att välja SD-kortet.
- Välj "Poddradio" med hjälp av Pil Vänster eller Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- Använd Pil Vänster eller Pil Höger för att välja önskad episod. Välj "uppdatera listan med episoder" från poddradiomenyn om du vill ha listan med episoder uppdaterad. Se avsnitt 12.5, "Skaffa senaste listan med episoder."
- Tryck på Start/Stopp-knappen för att börja lyssna på den önskade episoden. Om episoden redan laddats ner, börjar uppspelningen. Om nedladdning fortfarande pågår, anger PLEXTALK det. Om den inte laddats ner ännu, frågar PLEXTALK om du vill ladda ner den. Tryck på Enter för att ladda ner eller på Avbryt för att ångra dig.

12.4. Navigering från episod till episod eller snabbhopp på 10 minuter respektive 30 sekunder

Du kan välja den episod du vill ha. Du kan även gå till önskat ställe i episoden med hjälp av snabbhopp på 10 minuter respektive 30 sekunder.

- Välj navigeringsmetoden "episod", "10 minuter", eller "30 sekunder" med hjälp av Pil Upp eller Pil Ner.
- Om du valde "episod" som navigeringsmetod, trycker du på Pil Höger för att gå till nästa episod. Tryck på Pil Vänster för att gå tillbaka till förra episoden.
- Om du valde snabbhopp på 10 minuter eller 30 sekunder ska du trycka på Pil Höger för att gå framåt den önskade tidsintervallen. Tryck på Pil Vänster för att gå tillbaka 10 minuter respektive 30 sekunder. Du kan emellertid inte snabbhoppa ut ur episoden.

Märk. Framspolning och tillbakaspolning avstannar vid episodens början eller slut.

12.5. Skaffa senaste listan med episoder

Du kan gå till den önskade poddradiosändningens webbsajt och få den senaste listan med episoder genom att från poddradiomenyn välja "Uppdatera listan med episoder."

- Använd titel-knappen för att välja den poddradiosändning du vill uppdatera.
- Tryck på Meny.
- Välj "Poddradio" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- Välj "Uppdatera listan med episoder" med hjälp av Pil Vänster eller Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- PLEXTALK frågar då om du vill uppdatera listan med episoder. Tryck på Enter för att påbörja uppdateringen av listan med episoder. När uppdateringen är klar, kan du välja episod från den senaste listan med episoder.

12.6. Nedladdning av seriens samtliga episoder

Du kan ladda ner alla de episoder du inte har laddat ner än.

- Välj den poddradioserie du vill ladda ner med hjälp av Titel-knappen.
- Tryck på Meny.
- Välj "Poddradio" med hjälp av Pil Vänster eller Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- Välj "Ladda ner alla episoderna i sändningen" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- PLEXTALK frågar då om du vill ladda ner episoderna. Tryck på Enter för att först uppdatera listan med episoder. Sedan laddas alla episoderna ner en i taget.

Märk. Se avsnitt 12.7, "nedladdningsinformation" för att se vilken typ av information som meddelas under nedladdningen.

12.7. Nedladdningsinformation

- Det kan ta lite tid att uppdatera och ladda ner listan med episoder. Du kan emellertid lyssna på annat ljudmaterial medan nedladdningen pågår. Välj en annan titel med hjälp av Titel-knappen.
- Tryck på tangent 5 för att kolla hur långt nedladdningen hunnit. Du kan höra hur många episoder det återstår att ladda ner.

- Om du slår av PLEXTALK under pågående nedladdning, avbryts den. Du kan inte fortsätta nedladdningen där den avbröts, utan måste ladda ner episoden från början igen.

13. Webbradio

PLEXTALK ger dig möjlighet att lyssna på webbradio från olika webbsajter. Du måste mata in webbadressen för den webbradiostation du vill lyssna på i spellistan och sedan gå in på webbadressen för direktuppspelning.

13.1. Lägg in webbradiostationer i spellistan

För att kunna lyssna på webbradio måste du först inregistrera webbradiostationerna. Först och främst måste du ha tillgång till en dator och sätta ihop en spellistfil som kan ha filändelsen .pls, .m3u eller .asx och som innehåller stationens webbadress. Skapa sedan en mapp med namnet "PlexWebradio" i SD-kortets rotkatalog och spara filen i den mappen. Spara i denna mapp spellistan för varje ny webbradiostation du lägger till.

Märk. Du kan hitta spellistfiler på Internet på webbsidor för webbradiostationer som exempelvis "Shoutcast." <http://www.shoutcast.com>

13.2. Lyssna på webbradio

Gör så här för att lyssna på webbradio

- Välj "SD-kort" med hjälp av Titel-knappen.
- Välj "Kategori" med hjälp av Pil Upp och använd Pil Vänster och Pil Höger för att komma till "Webbradio."
- Välj "Titel" med hjälp av Pil Ner och använd Pil Vänster och Pil Höger för att välja webbradiostation. När du gjort ditt val, trycker du på Start/Stopp-knappen för att börja lyssna.

Märk. Det går inte att spola framåt eller tillbaka eller flytta mellan nivåerna när man lyssnar på webbradio.

Märk. Du kan inte lägga in bokmärken för webbradio. Om du växlar över till en ny station eller byter media, kan du inte lyssna till den förra stationen från det ställe där du slutade.

Märk. För att läsa om spelbara webbradioformat, kan du gå till "Specifikationer", Appendix A.

14. Spela in en Daisybok

PLEXTALK kan spela in DAISY-titlar på SD-kort. I det här kapitlet kan du läsa om inspelningsmetoden och inspelningsinställningarna.

Märk. PLEXTALK kan också spela in röstbokmärken och röstanteckningar till internminnet. Se avsnitten 6.16, "Använda bokmärken", och 17, "Anteckningsfunktionerna i PLEXTALK" för information om röstbokmärken och röstanteckningar.

14.1. Grundläggande information om inspelning med PLEXTALK

Innan du börjar spela in med PLEXTALK bör du läsa igenom de viktiga punkterna som beskrivs nedan.

- PLEXTALK kan inte spela in direkt till någon USB-enhet.
- PLEXTALK spelar alltid in i DAISY-format.
- Inspelade DAISY-titlar lagras alltid i mappen "PlexRecordings" på SD-kortet.

14.2. Inspelningshårdvara

Din PLEXTALK är utrustad med grundläggande funktioner som krävs för att göra en röstinspelning. Du kan dock köpa till ytterligare utrustning för att förbättra inspelningskvaliteten samt möjliggöra inspelningar ifrån externa enheter såsom kassettspelare, CD-spelare och liknande enheter. Den grundläggande utrustningen som krävs eller som du kan tänkas köpa till är följande:

- SD-kort – Du kan spela in till samt redigera informationen på ett SD-kort.
- Extern mikrofon (extrautrustning) – dynamiska mikrofoner och förstärkta stereomikrofoner kan användas. Välj en passande mikrofon som använder en 3.5 millimeters mini-plugg som kontakt.

Observera: När en kondensatormikrofon används, måste den vara kompatibel med ingångsnivåerna samt användas korrekt, annars kan den skadas. Var god läs mikrofonens manual innan du använder den.

- Ljudkabel (extrautrustning) – med antagandet att andra enheter har en passande anslutning kan du använda en ljudkabel med 3.5 millimeters stereo-mini-plugg som

kontakt för att spela in direkt från en kassettspelare, CD-spelare, radio eller liknande enhet.

- Hörlurar – ett par stereohörlurar med 3.5 millimeters mini-plugg som kontakt medföljer.

14.3. Inspelningsbara medium

Detta avsnitt räknar upp ett antal punkter som du bör känna till innan du spelar in på ett SD-kort.

- Med PLEXTALK kan du använda ett SD-kort för att spela in och redigera Daisyböcker. Du kan även radera och spela in på nytt så många gånger du vill.
- PLEXTALK klarar att använda SD-kort med en kapacitet på upp till 32 gigabyte. Innan du köper ytterligare SD-kort som skall används med PLEXTALK bör du försäkra dig om att det är kompatibelt. Kontakta din återförsäljare av PLEXTALK för råd.

Observera: Om du raderar och formaterar ett SD-kort med hjälp av en PC, försäkra dig om att du väljer filsystemet "FAT-16" eller "FAT-32".

14.4. Olika tillstånd vid inspelning

Under inspelning kan PLEXTALK befinna sig i 3 huvudtillstånd. Dessa är "Inspelning i vänteläge", "Inspelning pausad" och "Spelar in".

- När inspelningen är i vänteläge kan du justera inspelningsnivån samt välja ett inspelningsläge och ljudkvalité. Ingen inspelning görs under denna tid. Strömdioden är orange och blinkar i detta tillstånd.
- När inspelningen är pausad kan du justera inspelningsnivån men kan inte ändra inspelningsläget eller ljudkvalitén. Ingen inspelning görs under denna tid. Strömdioden är orange och blinkar i detta tillstånd.
- Under inspelning, spelas ljud från ljudingången in på SD-kortet. Du kan justera inspelningsnivån men inte inspelningsläget eller ljudkvalitén. Strömdioden är orange och lyser konstant.

14.5. Grundläggande inspelningsteknik

Detta avsnitt beskriver de normala stegen som används i en inspelningsprocess. De grundläggande stegen för inspelning med PLEXTALK är följande:

- Sätt in SD-kortet som du vill spela in på samt försäkra dig om att det inte är skrivskyddat.
- Anslut eventuell hårdvara och välj ingångskällan som du tänker använda.
- Tryck på Inspelningsknappen en gång för att aktivera vänteläget.
- Välj en bok som du vill spela in på.
- Ställ in inspelningsnivån manuellt eller välj automatisk reglering av ljudstyrka.
- Tryck på Inspelningsknappen igen för att starta inspelningen.
- Tryck på Inspelningsknappen igen för att pausa inspelningen när som helst.
- Tryck på Inspelningsknappen för att starta en pausad inspelning igen.
- Tryck på knappen Start/Stopp för att stoppa inspelningen.

Märk: Du kan pausa en inspelning så ofta som du behöver.

14.6. Tysta guiderösten under inspelning

För bästa inspelningskvalité är det rekommenderat att du tystar den interna guiderösten när du spelar in via den inbyggda mikrofonen eller via en extern mikrofon. Detta är för att undvika att guiderösten hörs i din inspelning. Du kan tysta guiderösten på följande 3 sätt:

- Dra ner volymen för guiderösten till noll – detta alternativ fungerar bra för seende som kan kontrollera inspelningsstatusen via lysdioden men är svårare för blinda användare som behöver guiderösten för att avgöra om PLEXTALK spelar in eller är pausad.
- Anslut hörlurar – allt utgående ljud från PLEXTALK hörs genom hörlurarna och inget guideljud spelas in.
- Stäng av guiderösten under inspelningen – PLEXTALK har möjlighet att automatiskt stänga av guiderösten när du startar en inspelning. När du spelar in hörs ingen guideröst men den återkommer automatiskt när du pausar eller stoppar inspelningen.

Guideröst under inspelning kan slås på av och på för följande sätt.

- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd vänster eller höger knapp för att gå till "Inspelningsinställningar" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "slå på eller av guideröst vid inspelning" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att välja antingen "guideröst på" eller "guideröst av" och tryck Enter för att bekräfta ditt val.

14.7. Anslut och välj ingångskälla

När du gör liveinspelningar av röster, konferenser, föreläsningar, presentationer och konserter kan du få bättre kvalitet med en extern mikrofon ansluten. För att spela in från en enhet såsom en kassettspelare, CD-spelare eller radio, skall du ansluta dem till PLEXTALK via kontakten för extern mikrofon och line in med en passande kabel. För att ansluta antingen en extern mikrofon eller ljudkabel, gör följande:

- Sätt in mikrofonen eller ljudkabeln i mikrofon-/line in-kontakten.
- PLEXTALK kommer att bekräfta att nåt är anslutet genom att säga "mikrofon läge" eller "line in läge".
- Om PLEXTALK säger "mikrofon läge" indikerar den även att inställningen "växla extern ljudingång" är inställd för en mikrofon.
- Om PLEXTALK säger "line in läge" indikerar den att inställningen är aktiverad för line in-källor.
- Om du har anslutit en mikrofon och PLEXTALK säger "line in läge" eller om du har anslutit en ljudkabel och PLEXTALK säger "mikrofon läge" måste du ändra inställningen manuellt i menyn. Se senare i avsnittet om hur du gör detta.

Märk: Vid denna tidpunkt vet inte PLEXTALK om du har anslutit en mikrofon eller ljudkabel. Rösten som du hör indikerar bara vad inställningen "växla extern ljudingång" är satt till.

För att ändra inställningen för den externa ingångskällan, gör följande:

- Tryck på Meny-knappen för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "Inspelningsinställningar" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "växla extern ljudingång" och aktivera det med Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att välja antingen "mikrofon läge" eller "line in läge" och tryck Enter för att bekräfta ditt val.

Observera: När du ansluter en kabel mellan linjeutgången från en CD-spelare till PLEXTALKs ljudingång kan ljudet ibland bli dåligt även om du justerar inspelningsnivån. Om det händer kan du prova att ansluta CD-spelarens hörlursutgång till PLEXTALKs ljudingång och sedan justera CD-spelarens hörlursvolym för inspelningen.

14.8. Välj inspelningsläge samt ljudkvalité

14.8.1. Inspelningslägen och ljudkvalité

När du spelar in ger PLEXTALK dig möjlighet att välja mellan 6 olika inspelningslägen. De 6 olika inspelningslägena är följande:

- Standard – för att skapa allmänna inspelningar och röstinspelningar där det finns relativt lite bakgrundsljud.
- Konferens – för inspelningsmiljöer såsom konferenser, föreläsningar och klassrum där bakgrundsljudet kan förväntas vara högt.
- Ljud – för inspelning från ljudenheter såsom CD-spelare.
- Ljudkassetter – för inspelning från analoga kassetter.
- Radio – för inspelning av radiosändningar.
- Anpassat – om inget av ovanstående alternativ ger dig den typ av inspelning som du vill låter detta inspelningsläge dig ställa in alla parametrar manuellt.

Du kan ställa in en rad olika ljudkvalitéer för varje inspelningsläge. När du väljer en högre inspelningskvalité minskar du den möjliga inspelningstiden på ditt SD-kort. Genom att välja en lägre ljudkvalité kan du maximera inspelningstiden men ljudet kommer inte att låta lika bra. Tillgängliga inställningar för ljudkvalité är följande:

- PCM 44.1kHz stereo
- PCM 22.05kHz mono
- Mp3 256kbps 44.1kHz stereo
- Mp3 128kbps 44.1kHz stereo
- Mp3 64kbps 44.1kHz mono
- Mp3 32kbps 22.05kHz mono

Märk: Teknisk data om inspelningslägen och ljudkvaliteter finns detaljerat beskrivna i Appendix D.

14.8.2. Välj ett förinställt inspelningsläge

Du kan antingen välja ett inspelningsläge och en ljudkvalité innan eller efter du går in i vänteläge för inspelningen. För att välja ett inspelningsläge samt inställning för ljudkvalité innan du går in i vänteläge för inspelning, gör följande:

- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.

- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "Inspelningsinställningar" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till alternativet "välj inspelningsläge" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att välja önskat inspelningsläge och aktivera det med knappen Enter.
- PLEXTALK ger dig sedan möjligheten att ställa in ljudkvalitén. Använd Vänster eller Höger knapp för att välja önskad ljudkvalité och aktivera valet med knappen Enter. PLEXTALK kommer att bekräfta ditt val.

För att välja ett inspelningsläge samt inställning för ljudkvalité efter du gått in i vänteläge för inspelning, gör följande:

- Tryck på Inspelningsknappen en gång för att aktivera vänteläget i PLEXTALK.
- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till alternativet "välj inspelningsläge" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att välja önskat inspelningsläge och aktivera det med knappen Enter.
- PLEXTALK ger dig sedan möjligheten att ställa in ljudkvalitén. Använd Vänster eller Höger knapp för att välja önskad ljudkvalité och aktivera valet med knappen Enter.
- PLEXTALK kommer att bekräfta ditt val. Du återvänder sedan till vänteläget när du gjort dina val.

Märk: I båda fallen som beskrivs ovan kommer inställningarna du gör att sparas som standardinställningar tills du ändrar dem i framtiden.

14.8.3. Välj skräddarsytt inspelningsläge

När du väljer skräddarsytt inspelningsläge måste specificera vilka inställningar du vill ha för alla 5 inspelningsparametrar. Med de förinställda inspelningslägena behöver detta ej göras. För att ställa in det skräddarsydda inspelningsläget, gör följande:

- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till inspelningsinställningar och välj det med Enter (precis som ovan är detta ej nödvändigt om du påbörjade denna process från vänteläget för inspelning).
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till alternativet "välj inspelningsläge" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "Anpassat" och aktivera det med Enter.

- PLEXTALK ger dig sedan möjligheten att ställa in ljudkvalitén. Använd Vänster eller Höger knapp för att välja önskad ljudkvalité och aktivera valet med knappen Enter.
- Du får nu chansen att välja önskade inställningar för alla 4 återstående inspelningsparametrar turvis.
- PLEXTALK kommer att meddela namnet på parametern. Använd Vänster eller Höger knapp för att välja önskad inställning och aktivera den med knappen Enter.
- PLEXTALK kommer att meddela namnet på nästa parameter. Upprepa denna process tills du har valt inställningar för parametern "Välj nivå för bakgrundsljud på ingångsljudet".
- När du är klart med denna sista inställning kommer PLEXTALK att bekräfta att inställningarna gjorts. Den kommer sedan att lämna menysystemet och återvända till tillståndet från vilken du startade processen ifrån.

14.9. Välj bok att spela in på

Detta avsnitt beskriver i detalj hur du väljer att spela in på en existerande bok eller på en ny bok. För att spela in på en existerande Daisybok, gör följande:

- Navigera till en existerande Daisybok på SD-kortet, som det beskrivits tidigare, och pausa uppspelningen.
- Tryck på Inspelningsknappen en gång för att aktivera vänteläget för inspelning.
- Alternativt kan du välja vilken bok du vill spela in till genom att använda Vänster och Höger knapp när du befinner dig i vänteläget.
- Tryck på Inspelningsknappen igen för att starta inspelningen. Ett nytt avsnitt kommer att skapas i slutet av den aktuella boken. Allt nytt ljud som spelas in kommer att läggas till i slutet på den aktuella boken, oberoende på var du befann dig i inspelningen när du startade processen.

För att spela in på en helt ny bok kan du antingen skapa en ny bok först och sedan spela in på den eller så kan du skapa en ny bok under inspelningsprocessen. Detta avsnitt beskriver hur du skapar en ny bok under inspelningsprocessen. För att skapa en ny Daisybok under pågående inspelning, gör följande:

- Tryck på Inspelningsknappen en gång för att aktivera vänteläget för inspelning.
- När du befinner dig i vänteläget för inspelning, använd Vänster och Höger knapp för att välja vilken bok du vill spela in på. När du flyttar höger kommer du att märka att PLEXTALK skapar en bok med namnet "Ny titel".
- Välj objektet "Ny titel" och tryck på Inspelningsknappen. PLEXTALK kommer att börja spela in på den nya boken.

Märk. Nya titlar lagras i mappen "PlexRecordings."

14.10. Ställ in inspelningsnivån

När du skapar en inspelning är det viktigt att inspelningsnivån är inställd korrekt. PLEXTALK ger dig 2 möjligheter för att justera inspelningsnivån. Du kan välja mellan att antingen få nivån inställd automatiskt eller att ställa in den själv. Du kan växla mellan automatisk och manuell inställning av inspelningsnivåerna på följande sätt:

- Tryck på Meny-knappen för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "Inspelningsinställningar" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "automatisk reglering av ljudstyrka" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att välja antingen "automatisk reglering av ljudstyrka på" eller "automatiskt reglering av ljudstyrka av" och tryck Enter för att bekräfta ditt val.

Märk: Om du har aktiverat "automatisk reglering av ljudstyrkan" i vänteläget kommer PLEXTALK att säga "automatisk" upprepade gånger för att indikera att nivån kommer att ställas in automatiskt.

Du kan ställa in inspelningsnivån manuellt på följande sätt:

- Ställ in alternativet "automatisk reglering av ljudstyrka" till "av" som det beskrivs ovan. Detta betyder att du har aktiverat manuell inställning av inspelningsnivån. Inspelningsnivån kan ställas in från 0 till 20 i steg om 1.
- Tryck på Inspelningsknappen en gång för att aktivera vänteläget.
- Tryck på knappen Upp. Varje gång du trycker på knappen kommer inspelningsnivån att öka ett steg.
- Tryck på knappen Ner. Varje gång du trycker på knappen kommer inspelningsnivån att minska ett steg.
- För större justeringar av inspelningsnivån kan du trycka ner och hålla inne knappen. PLEXTALK kommer att fortsätta öka eller minska nivån tills du släpper knappen eller når högsta respektive minsta nivån.
- När du justerar nivån kommer PLEXTALK att meddela den nya inspelningsnivån samt om den är "låg", "bra" eller "hög" för att indikera om inspelningsnivån är för låg, ganska bra eller för hög. Du bör sikta på att få PLEXTALK att meddela "bra" oftare än "låg" och "hög".

Märk: Om inställningen "övervakning av ljudnivå vid inspelning" är "av", kommer du inte att höra meddelandena "låg", "bra" och "hög".

Märk: När du spelar in ljudmaterial med inställningen "automatiskt reglering av ljudstyrka på" kanske du inte får den inspelingskvalité du vill ha. Om det sker kan du göra om din inspelning med "automatiskt reglering av ljudstyrka av" och justera inspelningsnivån manuellt.

14.11. Övervakning av ljudnivå vid inspelning

Övervakningen av ljudnivån är PLEXTALKs sätt att indikera om inspelningsnivån är låg, bra eller hög eller om den ställs in automatiskt. Standardinställningen i PLEXTALK är "övervakning av ljudnivå vid inspelning på" när du går in i vänteläget för inspelning. Rösten för "övervakning av ljudnivå vid inspelning" tystnar automatiskt när du börjar spela in.

Aktivera "övervakning av ljudnivå vid inspelning" när som helst under inspelningen, i vänteläget för inspelning eller under en pausad inspelning, genom att göra följande:

- Tryck på knappen Titel en gång.
- PLEXTALK säger antingen "övervakning av inspelningsnivå på" eller "övervakning av inspelningsnivå av".
- Varje tryckning på knappen Titel växlar mellan dessa två inställningar.

Märk: Om guideröst vid inspelning är avstängd kommer PLEXTALK inte att meddela knapparna du trycker på under inspelningen. Om du behöver denna funktion uppmanas du att använda hörlurar och aktivera guideröst vid inspelning för att undvika att guiderösten spela in.

14.12. Övervakning av ljudnivå vid inspelning på och av

PLEXTALK kan övervaka alla inspelningar när de görs så att du kan avgöra hur de kommer att låta i slutändan.

Du kan slå på och av "övervakning av ljudnivån vid inspelning" i vänteläget eller under inspelning. Detta görs på följande sätt:

- Anslut ett par stereohörlurar till ljudutgången på övre kanten av PLEXTALK.
- Tryck på knappen Bokmärke en gång för att slå av "övervakning av ljudnivå".
- Tryck på knappen Bokmärke igen för att slå på "övervakning av ljudnivå".

Märk: Du behöver inte använda hörlurar när du spelar in från en line in-källa.

Märk: För alla inspelningar aktiverar PLEXTALK "övervakning av ljudnivå" som standard.

14.13. Information om inspelningen

Du kan få information om den aktuella statusen för inspelningen genom att trycka på knapp 5.

Märk: Om guiderösten under inspelningen är inställd på "guideröst av" kommer du inte att höra någon av ovanstående information under inspelningen. Du kommer dock fortfarande att höra informationen i vänteläget och vid paus av inspelningen.

15. Redigera en Daisybok

15.1. Redigera rubrikmarkeringar under inspelning

Rubrikmarkeringar kan läggas in antingen när inspelningen är pausad eller under inspelningen. Båda metoderna beskrivs nedan:

- För att lägga in en rubrik under inspelning, tryck på knappen Gå till en gång. Den nya rubriken läggs in direkt.
- För att lägga in en rubrik under inspelning, tryck på knappen Gå till en gång. Rubriken läggs in när inspelningen påbörjas.
- När du fortfarande befinner dig i inspelningspaus kan du inställa rubriken genom att trycka på knappen Gå till en andra gång.

Märk: PLEXTALK kommer automatiskt att numrera rubrikerna i följd från början av boken.

15.2. Lägg in en rubrik efter inspelning

För att lägga in en rubrik efter en färdig inspelning, gör följande:

- Navigera i din inspelning till den ungefärliga positionen där du vill lägga in en rubrik.
- Under uppspelningen eller när uppspelningen är stoppad, tryck på Meny-knappen en gång för att öppna huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "redigera" och aktivera det med Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "lägg in rubrik" och aktivera det med Enter.
- PLEXTALK meddelar att du kommer att lägga in rubriken XX och ber dig ange positionen.
- Du kommer att höra 3 sekunder av ljud som upprepas från positionen du befinner dig i inspelningen.
- Justerar positionen för rubriken med Pil Vänster och Pil Höger.
- Använd dessa knappar för att flytta rubrikens position bakåt eller framåt i steg om 0.1 sekunder.
- När du är nöjd med positionen för rubriken, tryck Enter för att färdigställa. PLEXTALK kommer att bekräfta att rubriken lagts in.

Märk: Rubriker i inspelningen omnumreras automatiskt med start från början av inspelningen.

15.3. Radera en rubrik efter inspelning

För att radera en rubrik efter en färdig inspelning, gör följande:

- Navigera till platsen med rubriken som du vill radera.
- Under uppspelningen eller när uppspelningen är stoppad, tryck på Meny-knappen en gång för att öppna huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "redigera" och aktivera det med Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "radera rubrik" och aktivera det med Enter.
- PLEXTALK ber dig bekräfta raderingen av den valda rubriken. Om du vill radera denna rubrik, tryck Enter. PLEXTALK kommer att bekräfta att rubriken har raderats.

Märk: De återstående rubrikerna kommer att omnumreras automatiskt från början.

15.4. Radera ett eller flera avsnitt

PLEXTALK låter dig radera ett eller flera avsnitt i en Daisybok på följande sätt:

- Navigera till boken för vilken du vill radera ett eller flera avsnitt.
- Flytta bakåt eller framåt i boken till den ungefärliga platsen för det första avsnittet som du vill radera.
- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "redigera" och aktivera det med Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "radera avsnitt" och aktivera det med Enter.
- PLEXTALK ber dig markera det första avsnittet som skall raderas. Använd knappen Vänster eller Höger för att flytta bakåt eller framåt i boken tills du hör avsnittet och markera det genom att trycka på Enter.
- PLEXTALK ber dig markera det sista avsnittet som skall raderas. Använd knappen Vänster eller Höger för att flytta bakåt eller framåt i boken tills du hör avsnittet och markera det genom att trycka på Enter.
- Slutligen ber PLEXTALK dig att bekräfta att du vill fortsätta. Tryck Enter för att bekräfta handlingen eller avbryt för att inställa.

Märk: Om du vill radera ett enstaka avsnitt, tryck Enter på samma avsnitt som både första och sista avsnitt och fortsätt på samma sätt som vid radering av flera stycken.

Märk: Du kan endast radera flera avsnitt som ligger efter varandra. För att radera flera avsnitt som inte ligger efter varandra måste du radera dem en och en.

Märk: PLEXTALK kommer automatiskt att numrera om rubrikerna för avsnitten som finns kvar i boken.

16. Funktioner vid Hantera lagringsmedia

16.1. Radera ett SD-kort

PLEXTALK ger dig möjlighet att radera/formatera ett SD-kort så ofta du vill. För att radera ett SD-kort, gör följande:

- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "hantera lagringsmedia" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till alternativet "radera SD-kort" och aktivera det med Enter.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med formateringen. Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att inställa.
- Om du väljer att fortsätta kommer formateringsprocessen att starta. PLEXTALK meddelar när formateringen är slutförd.

Märk: Om SD-kortet raderas kommer all data på kortet att försvinna.

16.2. Skapa en ny bok

För att skapa en ny bok på SD-kortet när du inte befinner dig i vänteläge för inspelning, gör följande:

- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "hantera lagringsmedia" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "skapa ny bok" och aktivera det med knappen Enter.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta. Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att inställa.

Märk. Nya titlar skapas i mappen "PlexRecordings."

16.3. Radera en bok

Med PLEXTALK kan du radera böcker på ett SD-kort eller USB-medium. För att radera en bok, gör följande:

- Gå till boken som du vill radera.
- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "hantera lagringsmedia" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "radera vald bok" och aktivera det med Enter.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta. Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att inställa.

16.4. Filradering

Du kan radera musikfiler, audioböcker, samt poddradiosändningar. Gör så här för att radera en fil:

- Gå till den fil som du vill radera.
- Tryck på Meny en gång för att gå in på huvudmenyn.
- Gå till alternativet "Hantera lagringsmedia" med hjälp av Pil Vänster eller Pil Höger och välj det genom att trycka på Enter.
- Använd Pil Vänster och Pil Höger för att gå till alternativet "radera fil" och tryck på Enter för att välja det.
- PLEXTALK ber dig då bekräfta att du vill gå vidare. Tryck på Enter för att gå vidare eller Avbryt för att ångra.

16.5. Förbered för redigering av en Daisybok

Om du redan har byggt en inspelad bok eller om du har fått en bok någon annanstans ifrån som du vill redigera måste du först förbereda boken för redigering. För att förbereda en bok för redigering, gör följande:

- Gå till boken som du vill förbereda för redigering.
- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "hantera lagringsmedia" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "förbered för redigering" och aktivera det med Enter.
- PLEXTALK frågar dig om du vill fortsätta. Om du vill fortsätta tryck Enter eller tryck Avbryt för att inställa processen.
- PLEXTALK meddelar om framskridningen under processen och säger när den är klar. Om du vill inställa processen när den körs, tryck på knappen Avbryt.

OBSERVERA: När batterinivån är låg kan processen inställas. Det är därför rekommenderat att du ansluter PLEXTALK till ett strömuttag innan du utför denna process. Märk. Om du förbereder en titel för redigering kan du sedan spela in eller redigera filen. Märk. Om du förbereder en titel för redigering under kategorin "DAISY-bok" stannar filen kvar i den kategorin.

16.6. Färdigställ en Daisybok

Processen färdigställ bok konverterar en Daisybok inspelad på PLEXTALK till en Daisybok som kan spelas upp på andra apparater eller en dator med mjukvara för Daisyuppspelning. För att använda funktionen färdigställ bok, gör följande:

- Gå till boken som du vill färdigställa.
- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "hantera lagringsmedia" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "färdigställ bok" och aktivera det med Enter.
- PLEXTALK frågar dig om du vill fortsätta. Om du vill fortsätta tryck Enter eller tryck Avbryt för att inställa processen.
- PLEXTALK meddelar om framskridningen under processen och säger när den är klar. Om du vill inställa processen när den körs, tryck på knappen Avbryt.

OBSERVERA: När batterinivån är låg kan processen inställas. Det är därför rekommenderat att du ansluter PLEXTALK till ett strömuttag innan du utför denna process. Märk. Om du färdigställer en bok kan du inte längre spela in eller redigera boken. Skulle du vilja spela in eller redigera boken igen, måste du förbereda den för redigering en gång till.

Märk. Om du färdigställer en bok under kategorin "Inspelningar", stannar boken kvar i denna kategori.

Märk: Funktionen bygg bok kräver mellan 30 och 40 MB utrymme på SD-kortet.

16.7. Nätverksmappfunktionen

Med hjälp av nätverksmappfunktionen får din persondator via trådlös koppling till det lokala nätverket (Local Area Network, LAN) som delad nätverksmapp tillgång till det SD-kort du satt in i PLEXTALK. Gör så här för att aktivera nätverksmappfunktionen:

- Tryck på Meny.

- Använd Pil Vänster och Pil Höger för att gå till "Hantera lagringsmedia" och tryck sedan på Enter.
- Gå till alternativet "Nätverksmapp" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- Uppkoppling av nätverksmappen till nätverket sätter då igång, och PLEXTALK anger nätverksstatus när uppkopplingen är klar.
- Därefter får du tillgång till SD-kortet i PLEXTALK från din persondator.

För att gå ut ur nätverksmappfunktionen, gör så här:

- Tryck på Avbryt.
- PLEXTALK frågar då om du vill avsluta.
- Tryck då på Enter om du vill gå ur eller på Avbryt om du vill stanna kvar.

Märk. Se avsnitt 20, "Nätverksinställningar" för information om hur man går in på trådlöst LAN.

17. Anteckningsfunktionerna i PLEXTALK

Förutom att du kan använd PLEXTALK som en Daisyspelare, musikspelare och inspelare av Daisy kan du även använda den för att spela in enkla röstanteckningar.

17.1. Spela in en ny röstanteckning

För att spela in en ny röstanteckning, gör följande:

- Tryck ner och håll inne Inspelningsknappen och läs in ditt röstmeddelande.
- Släpp upp Inspelningsknappen när du är klar.
- PLEXTALK lägger in en ny röstanteckning i det interna minnet och tar dig sedan tillbaka till titeln du befann dig i innan du påbörjade inspelningen av röstanteckningen.

Märk: Du kan inte spela in en röstanteckning som är längre än 1 minut. När du spelat in mer än 1 minut slutar PLEXTALK automatiskt att spela in.

Märk: Den totala tillgängliga inspelningstiden för röstanteckningar är 30 minuter. Det maximala antalet enskilda röstanteckningar är 200.

Märk: Om den inspelade tiden överstiger 30 minuter eller om totala antalet röstanteckningar överstiger 200 kommer du att höra ett varningsmeddelande. Du bör då radera alla onödiga röstanteckningar eller kopiera dina röstanteckningar till ett SD-kort.

Märk: För röstanteckningar är ljudkompressionen låst till Mp3 på 32kbps mono.

17.2. Lyssna på existerande röstanteckningar

Du kan lyssna på dina inspelade röstanteckningar antingen i följd eller genom att välja en specifik röstanteckning direkt. För att lyssna på dina existerande röstanteckningar i en följd, gör följande:

- Tryck upprepade gånger på knappen Titel tills PLEXTALK säger "röstanteckning"
- Tryck på Pil Vänster eller Pil Höger för att flytta stegvis mellan befintliga röstanteckningar.
- Om du vill höra den aktuella röstanteckningen igen, tryck på knappen Start/Stopp.

För att gå direkt till en specifik röstanteckning, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till en gång.
- Använd nummerknapparna för att skriva in numret på den önskade röstanteckningen följt av Enter.

Märk: Du kan gå direkt till senaste röstanteckningen genom att trycka 0 följt av Enter.

17.3. Kopiera röstanteckningar till SD-kort

Var god kontrollera avsnitt 18.2 för information om kopiering av röstanteckningar.

17.4. Radera röstanteckningar

Om du vill radera en enskild röstanteckning, gör följande:

- Navigera till röstanteckningen som du vill radera på sättet som det beskrivits tidigare.
- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "röstanteckning" och aktivera det med Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att välja alternativet "radera vald röstanteckning" och aktivera det med knappen Enter.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta. Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att inställa.

Om du vill radera alla röstanteckningar, gör följande:

- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "röstanteckning" och aktivera det med Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att välja alternativet "radera alla röstanteckningar" och aktivera det med knappen Enter.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta. Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att inställa.

18. Kopiera.

18.1. Allmän information om kopiering

Innan du kopierar någon data bör följande punkter noteras:

- Du kan kopiera en mängd olika data från SD-kortet till ett externt USB-medium eller vice versa. Däremot kan en extern USB-CD/DVD-enhet endast användas som källa vid kopiering.
- Under kopieringsprocessen ger PELXTALK varningsmeddelanden om det finns för lite utrymme tillgängligt på målmediet.
- Om du vill kopiera från en musikskiva med hjälp av en extern USB-CD/DVD-enhet kan du välja vilken ljudkomprimering som skall användas. Den kopieras som ljudfiler och inte i Daisyformat.
- När batterinivån är låg kan kopieringen inställas. Det är därför rekommenderat att du ansluter PLEXTALK till ett strömuttag innan du utför denna process.
- Om du vill inställa kopieringsprocessen när den körs, tryck på knappen Avbryt.
- Man kan inte göra säkerhetskopior av poddradioepisoder eller webbradio.
- Säkerhetskopior av data lagras i avsedda mappar enligt följande:
 - DAISY: "PlexBackup"
 - Inspelningar: "PlexBackup"
 - Musik: "PlexBackup"
 - Text: "PlexBackup"
 - Ljudbok av .aa-format: i mappen "Backup" under "Audible"-mappen.
 - Övriga slags ljudböcker: i "Backup"-mappen under "PlexAudioBook"-mappen.

18.2. Kopiera röstanteckningar

Detta avsnitt beskriver i detalj hur du kopierar röstanteckningar från det interna minnet till SD-kort.

- Sätt in ett SD-kort med tillräckligt mycket ledigt utrymme.
- Tryck på knappen Boklista för att navigera till Röstanteckningar och tryck Enter.
- Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera kopieringsfunktionen.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med kopieringen. Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att inställa.
- Om du väljer att fortsätta kommer kopieringsprocessen att starta. PLEXTALK meddelar när kopieringen är slutförd.

Märk. Den enda säkerhetskopiering av internminnet för röstanteckningar som är möjlig är till SD-kortets "PlexBackup"-mapp.

Märk: Röstanteckningar sparas som en Daisybok med 1 nivå navigation. Varje röstanteckning sparas som ett separat avsnitt.

Märk: När du kopierar Röstanteckningar kopieras alla röstanteckningar. Du kan inte kopiera en särskild röstanteckning.

18.3. Kopiera en Daisybok, album eller textfil från ett SD-kort till en USB-enhet

För att kopiera en Daisybok, album eller textfil från ett SD-kort till en extern USB-enhet, gör följande:

- Anslut ett externt USB-medium med tillräckligt mycket ledigt utrymme.
- Sätt in SD-kortet som är källan.
- Navigera till boken, albumet eller textfilen på SD-kortet som du vill kopiera och tryck Enter.
- Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera kopieringsfunktionen.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med kopieringen. Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att inställa.
- Om du väljer att fortsätta kommer kopieringsprocessen att starta. PLEXTALK meddelar när kopieringen är slutförd.

Märk: Du kan inte kopiera till en extern USB-CD/DVD-enhet.

18.4. Kopiera en Daisybok, album eller textfil från en extern USB-enhet till ett SD-kort

För att kopiera en Daisybok, album eller textfil från en extern USB-enhet till ett SD-kort, gör följande:

- Sätt in ett SD-kort med tillräckligt mycket ledigt utrymme och försäkra dig om att det inte är skrivskyddat.
- Anslut det externa USB-mediumet.
- Navigera till boken, albumet eller textfilen på USB-enheten som du vill kopiera och tryck Enter.
- Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera kopieringsfunktionen.
- När du kopierar ifrån en musikskiva, tryck på Vänster eller Höger pilknapp för att välja önskad ljudkompression och tryck på Enter för att bekräfta ditt val.

- Vid säkerhetskopiering av musik-cd frågar PLEXTALK vilken kategori du vill spara till, "Musik" eller "Audiobok". Välj önskad kategori med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med kopieringen. Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att inställa.
- Om du väljer att fortsätta kommer kopieringsprocessen att starta. PLEXTALK meddelar när kopieringen är slutförd.

18.5. Kopieringstid för en musikskiva

För olika samplingshastigheter eller bithastigheter ges den ungefärliga kopieringstiden nedan:

Kopiering av ungefär 50 minuter ljud från en musikskiva till ett SD-kort:

- PCM 44.1kHz Stereo: Ungefär 35 minuter.
- MP3 256K Stereo Hög kvalitet: Ungefär 50 minuter.
- MP3 256K Stereo: Ungefär 40 minuter.
- MP3 128K Stereo Hög kvalitet: Ungefär 55 minuter.
- MP3 128K Stereo: Ungefär 40 minuter.

Märk: Alla tider är ungefärliga. Tiden för kopieringen beror på storleken på källboken samt antalet filer. Den beror också på SD-kortets skrivhastighet.

19. Använda PLEXTALK som en SD-kortläsare

Du kan ansluta PLEXTALK till en dator med hjälp av en USB-kabel för att använda den som en extern kortläsare. Detta kapitel beskriver hur du ansluter och kopplar ifrån PLEXTALK till en dator med olika operativsystem.

Märk: För att använda PLEXTALK som en extern minneskortsläsare måste din dator ha något av följande operativsystem: Windows 2000, XP, Vista eller Windows 7.

19.1. Vad kan PLEXTALK användas till när den är ansluten till en dator?

När PLEXTALK är ansluten till en dator som en kortläsare kan du utföra vanliga funktioner för filhantering såsom:

- Överföra Daisyböcker, ljudfiler och textfiler mellan SD-kort och datorn.
- Skapa, radera och byta namn på mappar på SD-kortet.
- Radera och byta namn på filer på SD-kortet.
- Överföra ljudfiler från en dator till ett SD-kort och lyssna på dem med hjälp av datorn, med andra ord, använd PLEXTALK som en lagringsenhet för musikfiler.

19.2. Ansluta PLEXTALK till en dator som en extern enhet

För att ansluta PLEXTALK till en dator, använd följande procedur:

- Slå på din dator.
- Anslut strömkabeln till PLEXTALK och starta den.
- Anslut USB-kabeln från PLEXTALK till datorn.
- Datorn identifierar automatiskt PLEXTALK som en extern minneskortläsare.

OBSERVERA: När PLEXTALK är ansluten till en dator som en extern minneskortsläsare bör du undvika att slå av PLEXTALK, dra ur USB-kabeln eller ta ut SD-kortet. Om detta ej efterföljs kan skador eller dataförlust uppstå.

Märk: Så snart PLEXTALK känner av anslutningen till en dator blir den en extern minneskortläsare för datorn och kan inte spela upp eller spela in så länge den är ansluten.

19.3. Koppla ur PLEXTALK från en dator

När man kopplar ur PLEXTALK från en dator, använd proceduren nedanför:

- Vänsterklicka på ikonen "USB" eller "Säker borttagning av maskinvara" som finns i systemfältet längst nere till höger på datorskärmen.
- Välj denna enhet i listan över tillgängliga enheter som kan stoppas.

Märk: Om du har svårt att hitta eller klicka på ikonen i systemfältet, slå av datorn och PLEXTALK och dra sedan ut kablén.

20. Nätverksinställningar

PLEXTALK kan anslutas till nätverket via trådlöst LAN.

Varning: Om du befinner dig i ett flygplan eller på sjukhus är det förmodligen inte tillrådligt att använda den trådlösa LAN-funktionen, och du måste här följa de anvisningar som gäller.

20.1. Anslut till trådlöst nätverk

20.1.1. Aktivera nätverksenheten

Gör så här för att aktivera nätverksenheten:

- Tryck på Meny-knappen.
- Välj alternativet "Systeminställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- Gå till alternativet "Nätverksinställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- Gå till alternativet "aktivera eller avaktivera nätverksenheten" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- Använd Pil Vänster eller Pil Höger för att välja "aktivera" och tryck på Enter.

20.1.2. Verifiera att trådlöst nätverk är tillgängligt och anslut

Verifiera de för närvarande tillgängliga trådlösa nätverken från listan "Tillgängliga nätverk".

- Tryck på Meny-knappen.
- Välj alternativet "Systeminställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- Gå till alternativet "Nätverksinställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- Använd Pil Vänster och Pil Höger för att gå till alternativet "Inställningar för trådlöst nätverk" och tryck på Enter.
- Använd Pil Vänster och Pil Höger för att gå till alternativet "Tillgängligt trådlöst nätverk" och tryck på Enter.

- PLEXTALK läser då upp namn, länkstatus, samt signalstyrka för ett av de för tillfället tillgängliga nätverken. Tryck på Pil Vänster eller Pil Höger för att gå till ett annat nätverk och verifiera dess information.
- Välj det trådlösa nätverk du vill anslutas till och tryck sedan på Enter.

Om du väljer ett trådlöst nätverk som konfigurerats, försöker PLEXTALK ansluta till det. Om du valde ett trådlöst nätverk som inte blivit konfigurerat, gör så här:

- Välj "Säkerhetsförfarande." Använd Pil Vänster och Pil Höger för att välja typ av säkerhetsförfarande. Tryck sedan på Enter och skriv in ett lösenord. Se avsnitt 22, "Inmatning av text" för ytterligare detaljer angående textinmatning. När inmatningen är klar, trycker du på Ner för att den ska träda i kraft. Om du valde "Inget säkerhetsförfarande", behöver du inte skriva in något lösenord.
- Välj "Smyginställning", och välj "Aktiverad" om det aktuella trådlösa nätverket använder sig av funktionen. Om inte, välj "avaktiverad." Tryck sedan på Enter.
- Välj "DHCP-inställning." Använd Pil Vänster och Pil Höger för att välja "aktivera" för automatisk inställning och "Avaktivera" för manuell inställning och tryck på Enter. Om du valde "Aktiverad", kommer en meny med proxyinställningar upp.
- Skriv in IP-adressen. En IP-adress består av fyra fält med inskrivna siffror i vart och ett.
- PLEXTALK läser upp siffrorna i första fältet. Använd nummerknapparna om du vill ändra numret och gå sedan till nästa fält genom att trycka på Pil Höger. Om du inte vill ändra numret behöver du bara trycka på Pil Höger.
- Gå vidare genom fälten 2 till 4. Använd Pil Höger för att gå till nästa fält och Pil Vänster för att gå till förra fältet. När inmatningen eller kollen är klar, tryck på Ner.
- Inmatning av subnätmasken. Gör på samma sätt som vid inmatning av IP-adressen.
- Inmatning av förvald nätbrygga. Gör på samma sätt som vid inmatning av IP-adressen.
- Inmatning av DNS-inställningar. Primära såväl som sekundära DNS-inställningar kan användas. Gör på samma sätt som vid inmatning av IP-adressen.
- Välj "Inställningar för mellan-server." Vill du använda mellan-server, väljer du "Aktivera" med hjälp av Pil Vänster eller Pil Höger. Välj "Avaktivera" om mellan-server inte ska användas. Tryck sedan på Enter.
- Om "Avaktivera" valdes och du trycker på Enter, stängs menyn.
- Om "Aktivera" valdes ska du skriva in mellan-server-adressen och, när den är klar, trycka på Ner.
- Mata sedan in numret för mellan-serverns port och tryck på Ner. PLEXTALK kommer då att försöka koppla in till det trådlösa nätverket.
- Menyn stängs automatiskt när anslutningen ägt rum. Om anslutningen inte lyckas, återvänder PLEXTALK automatiskt till menyn för att låta dig välja tillgängliga trådlösa nätverk.

Märk. Nätverksinställningar såsom nätverksnamn (SSID), samt säkerhetsförfarande bestäms av varje enskilt nätverk. välj de nätverksinställningar som överensstämmer med specifikationerna för ditt nätverk.

Märk. Om säkerhetsförfarandet står på "WEP, måste lösenordet innehålla 5, 10, 13, eller 26 skrivtecken. För säkerhetsförfaranden andra än WEP gäller en lösenordslängd på 8-64 skrivtecken.

Märk. Om du väljer ett nätverk som för tillfället är anslutet, bryter PLEXTALK anslutningen och försöker koppla upp till ett nätverk enligt den i PLEXTALK angivna prioritetsordningen. PLEXTALK frågar då om du vill bli nedkopplad. Tryck på enter för att gå ut ur nätverksanslutningen eller tryck på Avbryt för att ångra. Se avsnitt 20.3.5, "Ändra eller radera inställningar för trådlöst nätverk" för att läsa mer information rörande prioritet.

20.2. Så här ansluts PLEXTALK till nätverk

PLEXTALK försöker automatiskt ansluta till nätverket så länge menyalternativet "Aktivera eller avaktivera nätverksenheten" står på "Aktivera."

Märk. Se avsnitt 20.1.1, "Aktivera nätverksenheten" för information om hur man aktiverar respektive avaktiverar den.

Till att börja med försöker PLEXTALK ansluta till ett nätverk från den anslutning som sist användes. Lyckas inte det, försöker PLEXTALK ansluta till ett annat nätverk enligt den i PLEXTALK specificerade prioritetsordningen. Se avsnitt 20.3.5, "Ändra eller radera inställningar för trådlöst nätverk" för ytterligare information rörande prioritetsordning.

Om nätverksfunktionen varit inaktiv för över fem minuter utan ström från elnätet, kan det dröja ett par sekunder eller på sin höjd några minuter innan PLEXTALKs nätverksfunktion träder i kraft igen. Detta förklaras av att PLEXTALK ställer nätverksfunktionen på sparläge och försöker återansluta till nätverket.

20.3. Avancerade nätverksinställningar

20.3.1. Verifiera nätverksinformationen

Under den här menyn kan du verifiera vad den aktuella nätverksanslutningen har för inställningar. Menyn innehåller följande parametrar:

- Åtkomstpunktens länkstatus
- Signalstyrka

- DHCP
- IP-adress
- Subnätmasken
- Förvald nätbrygga
- Primär DNS
- Sekundär DNS
- MAC-adress för trådlöst nätverk
- Datum då DHCP-leasning erhöles
- Datum då DHCP-leasning utlöper
- Server-adress för DHCP

Om PLEXTALK inte lyckas sammanlänka med nätverket, blir följande parametrar tillgängliga:

- Länkstatus
- MAC-adress för trådlöst nätverk

Gör så här för att verifiera ovanstående information:

- Tryck på Meny-knappen.
- Välj alternativet "Systeminställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- Gå till alternativet "Nätverksinställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- Använd Pil Vänster och Pil Höger för att komma till alternativet "Verifiera nätverksinformation" och tryck på Enter.
- PLEXTALK säger "Information", och du använder då Pil Vänster och Pil Höger för att välja vilken information du vill höra.

20.3.2. Hämta in nätverksinställningar

PLEXTALK kan konfigurera flera nätverksinställningar samtidigt genom att hämta in nätverksinställningar som sammanställts i persondatorn. Programvaran sparar nätverksinställningarna i en fil vid namnet "NetworkSetting.ini." Lägg in denna fil i SD-kortets eller USB-enhetens rotkatalog och hämta vid behov fram inställningarna med hjälp av menyn "Hämta in nätverksinställningar."

- Tryck på Meny-knappen.
- Använd Pil Vänster och Pil Höger för att gå till alternativet "Systeminställningar" och tryck på Enter.

- Tryck på Pil Vänster eller Pil Höger för att gå till alternativet "Nätverksinställningar" och tryck på Enter.
- Använd Pil Höger eller Pil vänster för att gå till alternativet "Hämta nätverksinställningar" och tryck på Enter.
- PLEXTALK frågar då om du vill fortsätta, dvs. öppna filen. Tryck på Enter för att gå vidare eller på Avbryt för att ångra.

Märk. Alla befintliga inställningar raderas när nya nätverksinställningar laddas.

Märk. Skulle både SD-kortet och USB-enheten vara insatta i PLEXTALK och båda innehålla en fil med namnet "networkSetting.ini" i sin respektive rotkatalog, hämtas den fil som ligger på SD-kortet.

Märk. Du kan generera en fil med nätverksinställningar i ett program speciellt avsett för ändamålet. Du kan hämta såväl instruktionsboken som genereringsprogrammet från PLEXTALKs hemsida, <http://www.plextalk.com/in/>

20.3.3. Spara nätverksinställningar

Man kan göra säkerhetskopia av sina PLEXTALK-inställningar och spara dem antingen på SD-kortet eller i USB-enheten. Gör så här för att spara inställningarna:

- Tryck på Meny-knappen.
- Välj alternativet "Systeminställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- Gå till alternativet "Nätverksinställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- Använd Pil Vänster och Pil Höger för att gå till "Spara inställningarna för nätverket".
- PLEXTALK frågar då om du vill gå vidare och spara inställningsfilen eller inte. För att gå vidare, tryck på Enter. Filen lagras i rotkatalogen på antingen SD-kortet eller USB-enheten. För att ångra, tryck på Avbryt.

Märk. Om både SD-kortet och USB-enheten sitter i PLEXTALK, sparas filen i SD-kortets rotkatalog.

20.3.4. Lägg till nätverksinställningar för trådlöst nätverk

Gör så här för att lägga till inställningar för trådlöst nätverk.

- Tryck på Meny-knappen.
- Välj alternativet "Systeminställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.

- Gå till alternativet "Nätverksinställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- Gå till alternativet "Inställningar för trådlöst nätverk" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck på Enter.
- Gå till alternativet "Lägg till inställning för trådlöst nätverk" och tryck på Enter.
- Välj "Säkerhetsläge." Inställningsmomenten är desamma som för "Tillgängligt trådlöst nätverk". Se avsnitt 20.1.2, "Verifiera att trådlöst nätverk är tillgängligt och anslut".
- När alla parametrar färdiginställts, inregistreras det nytillagda trådlösa nätverket som det högst prioriterade. Sedan stängs menyn och PLEXTALK försöker sedan ansluta till det nyinlagda nätverket.

20.3.5. Ändra eller radera inställningar för trådlöst nätverk

Under menyn "Ändra eller lägg till inställning för trådlöst nätverk" finns det tre valmöjligheter: "Tilldela högsta prioritet och anslut", "Ändra inställning för trådlöst nätverk", samt "Ta bort inställning för trådlöst nätverk". Gör så här för att ändra eller radera inställningar för trådlöst nätverk:

- Tryck på Meny-knappen.
- Gå till alternativet "Systeminställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck på Enter.
- Gå till alternativet "Nätverksinställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck på Enter.
- Gå till alternativet "Inställningar för trådlöst nätverk" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck på Enter.
- Gå till alternativet "Ändra eller lägg till inställning för trådlöst nätverk" och tryck på Enter.
- Använd vänster- eller högerpil för att välja det trådlösa nätverk du vill ändra eller vars inställning du vill radera och tryck sedan på Enter. Listan med trådlösa nätverk står uppräknad enligt anslutningsprioritet.
- Med hjälp av Pil Vänster eller Pil Höger kan du välja "Tilldela högsta prioritet och anslut", "Ändra inställning för trådlöst nätverk", eller "Ta bort inställning för trådlöst nätverk". Tryck sedan på Enter.

Om valet är "Tilldela högsta prioritet och anslut",

- Kommer PLEXTALK att uppmana dig att tilldela högsta prioritet till det markerade trådlösa nätverket. Tryck på Enter för att verkställa prioriteringen. Därefter försöker PLEXTALK ansluta till nätverket.

Om valet är "Ändra inställning för trådlöst nätverk",

- Välj "Säkerhetsläge." Inställningsmomenten är desamma som för "Tillgängligt trådlöst nätverk." Se avsnitt 20.1.2, "Verifiera att trådlöst nätverk är tillgängligt och anslut".
- När parametrarna är färdiginställda, inregistreras de uppdaterade inställningarna, och menyn stängs. Prioriteringen förblir densamma även om inställningarna uppdaterats.

Märk. Om du behöver ändra nätverkets SSID, ta först bort nätverket. Lägg sedan till ett nytt nätverk igen.

Om "Ta bort inställning för trådlöst nätverk" valdes,

- Frågar PLEXTALK om du vill gå vidare. Tryck på Enter för att svara jakande och radera nätverket. När raderingen utförts, försöker PLEXTALK på nytt att ansluta till det nätverk som har högsta prioritet.

20.3.6. Inställningar för nätverksmappar

Du kan konfigurera namnet på nätverksenhet, användarnamn, samt lösenord. De förinställda värdena är:

- Nätverksenhetens namn: PTP1-(serienumrets 4 sista siffror), exempelvis" PTP1-1234."
- Användarnamn: (inget användarnamn).
- Lösenord: (inget lösenord).

För att ändra inställningarna för nätverksmappar, gör så här:

- Tryck på Meny-knappen.
- Gå till alternativet "Systeminställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck på Enter.
- Gå till alternativet "nätverksinställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck på Enter.
- Gå till alternativet "Inställning för nätverksmapp" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck på Enter.
- PLEXTALK läser upp namnet på nätverksenheten, användarnamnet och lösenordet. PLEXTALK frågar om du vill ändra någon av parametrarna. Tryck på Ner om du vill ändra någon av parametrarna.

- PLEXTALK anger namnet på nätverksenheten. Om du är nöjd med det befintliga namnet, tryck på Ner. Om du vill ändra till ett nytt namn, använd nummerknapparna för att mata in det nya namnet. Mata in enhetens namn, upp till 15 tecken långt, med hjälp av siffrorna 0-9, A-Z, a-z, samt bindestreck (-). Namnet bör innehålla minst ett bokstavstecken. När inmatningen är klar, trycker du på Ner för att den ska träda i kraft.
- PLEXTALK läser upp användarnamnet. Tryck bara på Ner om du godtar det befintliga användarnamnet. Om du vill ha ett nytt användarnamn, mata in det nya användarnamnet med nummerknapparna. Mata in användarnamnet, upp till 32 tecken långt, med hjälp av siffrorna 0-9, A-Z, a-z, samt bindestreck (-) och understreck (_). När inmatningen är klar, trycker du på Ner för att den ska träda i kraft. Om du raderar det befintliga användarnamnet och därefter trycker på Ner, återgår systemet till förvalt användarnamn och lösenord, varefter menyen stängs.
- PLEXTALK kommer att ange lösenord. Om du godtar det befintliga lösenordet, tryck på Ner. Om du vill ändra till nytt lösenord, mata in ett lösenord på upp till 32 tecken långt med hjälp av nummerknapparna. När du är klar, tryck på Enter för att inmatningen ska träda i kraft. Parametrarna är därmed färdiginställda, och PLEXTALK går ut ur menyhierarkin.

Märk. Se avsnitt 22, "Textinmatning" för ytterligare detaljer angående textinmatning.

20.3.7. Återställning av nätverksparametrarna till fabriksinställningarna

I såväl "Aktivera och avaktivera nätverksenhet", "Inställningar för trådlöst nätverk", som i "Inställningar för nätverksmappar" kan nätverksinställningarna återställas till de ursprungliga fabriksinställningarna. För att återställa nätverksinställningarna till ursprungsparametrarna, gör så här:

- Tryck på Meny-knappen.
- Gå till alternativet "systeminställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- Gå till alternativet "Nätverksinställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck sedan på Enter.
- Gå till alternativet "Återställ nätverksparametrarna till fabriksinställningar" och tryck sedan på Enter.
- PLEXTALK frågar då om du vill fortsätta med att återställa nätverksparametrarna. Tryck på Enter för att återställa eller på Avbryt för att ångra.

Märk. Efter avslutad återställning blir nätverksenheten inställd på "Avaktiverad."

21. Redigering av textfiler

Det är möjligt att skriva och spara dokument i PLEXTALK. I det här kapitlet kan du läsa om hur man skapar och lagrar en textfil. De olika sätten på vilka textinmatning kan göras ser du i kapitel 22.

21.1. Skapa en ny textfil

Gör så här för att skapa en ny textfil:

- Tryck på Meny-knappen för att komma till huvudmenyn.
- Gå till alternativet "Hantera lagringsmedia" och tryck på Enter.
- Gå till alternativet "Skapa en ny textfil" och tryck på Enter.
- PLEXTALK frågar då om du vill gå vidare. Tryck på Enter för att fortsätta. En ny textfil har nu skapats, och du har kommit till läge "Textredigering."

21.2. Redigering av befintlig textfil sparad på SD-kortet

Gör så här för att börja redigera en befintlig textfil:

- Tryck på Titel-knappen för att välja önskad textfil på SD-kortet.
- Tryck på Meny-knappen för att komma till huvudmenyn.
- Gå till alternativet "Redigering" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck på Enter.
- PLEXTALK frågar då om du vill gå vidare. Tryck på Enter för att fortsätta. Nu kan du redigera textfilen.

Märk. Textfiler som sparats på USB-minnet kan inte redigeras.

21.3. Spara redigerad text

Gör så här för att spara redigerad text:

- Tryck på Meny-knappen.
- Gå till alternativet "Spara den redigerade texten" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck på Enter.
- PLEXTALK frågar då om du vill fortsätta. Tryck på Enter för att gå vidare eller på Avbryt för att ångra.

- Trycker man på Enter, sparas den redigerade texten, och PLEXTALK återgår sedan till textredigeringsläget.

Märk. Första raden i texten blir filnamnet. Om texten inte har något filnamn då den sparas, används det aktuella datumet och klockslaget som filnamn.

21.4. Lämna textredigeringen

21.4.1. Spara och lämna textredigeringen

Gör så här för att spara och lämna textredigeringen:

- Tryck på Titel-knappen.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill spara och lämna textredigeringen. Tryck på Enter för att gå ur eller på Avbryt för att fortsätta att redigera texten.
- När man tryckt på Enter, sparas PLEXTALK texten och visar titellistan.

Alternativt kan man:

- Trycka på Menyknappen.
- Välja "Spara och avsluta textredigering" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och sedan trycka på Enter.
- PLEXTALK ber dig då bekräfta att du vill gå vidare. Tryck på Enter för att fortsätta eller på Avbryt för att ångra.
- När man tryckt på Enter, sparas PLEXTALK texten, som därefter blir tillgänglig för uppspelning.

21.4.2. Lämna textredigering utan att spara filen

Gör så här för att lämna redigeringen utan att spara texten:

- Tryck på Menyknappen.
- Gå med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger till alternativet "Avsluta textredigeringsläget utan att spara" och tryck på Enter.
- PLEXTALK ber dig då bekräfta att du vill gå vidare. Tryck på Enter för att fortsätta eller på avbryt för att inställa.
- Om man tryckt på Enter, kasserar PLEXTALK redigeringarna och återställer texten till tidigare skick.

21.5. Omdöpning av filer

Gör så här för att döpa om en fil:

- Tryck på Meny-knappen.
- Gå med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger till alternativet "Byt namn på textfilen" och tryck på Enter.
- Redigera filnamnet.
- Tryck på Pil Ner. PLEXTALK frågar då om du vill gå vidare.
- Tryck på Enter för att gå vidare eller på Avbryt för att ångra.

Märk. Var god läs kapitel 22 för ytterligare information rörande textinmatning.

Märk. För att höra det nya filnamnet, tryck på Start/Stopp-knappen.

21.6. Radering av rad.

Gör så här för att radera raden som markören står i:

- Tryck på Meny-knappen.
- Gå med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger till alternativet "Radera den aktuella raden" och tryck sedan på Enter.
- PLEXTALK frågar då om du vill gå vidare. Tryck på Enter för att fortsätta eller på Avbryt för att ångra.

21.7. Radering av hela texten

Gör så här för att radera hela texten:

- Tryck på Meny-knappen.
- Gå med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger till alternativet "Radera all text i filen" och tryck på Enter.
- PLEXTALK frågar då om du vill gå vidare. Tryck på Enter för att fortsätta eller på Avbryt för att ångra.

22. Textinmatning

det här kapitlet behandlar hur man matar in skrivtecken.

22.1. Alfabetisk inmatning enligt ABC-metoden

Varje nummerknapp är kopplad till ett flertal skrivtecken. Vilket skrivtecken som aktiveras beror på hur många gånger man trycker på knappen.

Teckenuppsättningens ordningsföljd

Tecken som länkats till en nummerknapp förekommer i ordningen Gemena bokstäver, siffror, samt versaler. Tryck exempelvis på nummerknapp 5 en gång för j, 2 gånger för k, 3 för l, 4 för siffran 5, 5 för stort j, 6 för stort K, och 7 gånger för stort L.

Skrivtecknet antas automatiskt efter två sekunder

När fokus stått på ett visst skrivtecken i två sekunder utan åtföljande aktivitet, antar PLEXTALK att skrivtecknet ska anses bekräftat och läser upp dess namn.

Inmatning av skrivtecken utan väntetid

För att mata in skrivtecken länkade till nummerknapparna utan att behöva vänta i två sekunder mellan varje, tryck på Pil Höger för att gå ett steg framåt och mata in nästa skrivtecken. Om du till exempel vill mata in "ab", Tryck på nummerknapp 2 en gång för bokstaven a följt av en tryckning på Pil Höger. Tryck sedan på nummerknapp 2 2 gånger för att få bokstaven b.

Illustrationsexempel

Så här matar du in "http":

h -- Tryck på knapp 4 två gånger.

t -- Tryck på knapp 8 en gång.

t -- Tryck på knapp 8 en gång.

p -- Tryck på knapp 7 en gång.

Bokstäver och siffror som går att mata in

Här är teckenordningen för varje nummerknapp:

Ettan har ".", "@", "/", ":", och "1"

Tvåan har a, b, c, ä, å, 2, A, B, C, Ä, och Å.

Trean har d, e, f, 3, D, E, och F.

Fyran har g, h, i, 4, G, H, och I.

Femman har j, k, l, 5, J, K, och L.

Sexan har m, n, o, ö, 6, M, N, O, och Ö.

Sjuan har p, q, r, s, ß, 7, P, Q, R, och S.

Åttan har t, u, v, 8, T, U, och V.

Nian har w, x, y, z, 9, W, X, Y, och Z.

Nollan har "?", "_", "=", och "0".

Verifiering av inmatade skrivtecken

Tryck på Start/Stopp-knappen för att höra vad som matats in.

Byte av inmatningsmetod enligt annan skrivteckentyp

För att byta inmatningsmetod baserad på annan typ av skrivtecken, tryck på bokmärkesknappen för att navigera mellan metoderna "abc", "nummer" eller "symboler."

Märk. Om nummermetoden är den enda möjliga inmatningsmetoden, ändras inmatningsmetoden inte, oavsett om man trycker på bokmärkesknappen.

22.2. Sifferinmatning enligt nummermetoden

Nummermetoden är den enligt vilken siffror inmatas genom att man trycker på nummerknapparna. Tryck på bokmärkesknappen ett antal gånger och sedan på "nummerinmatning."

Skriv in siffrorna genom att trycka på nummerknapparna.

Nummerknapparna 1-0 motsvaras av sina respektive siffror.

22.3. Symbolinmatning enligt symboltabellen

Symbolmetoden är den metod enligt vilken symboler matas in från en tabell där knapparna 2, 4, 6, och 8 används för att rulla fram symbolerna i tabellen. Trycker man på fyrkant, matas den symbol som har fokus in i textan. Tryck på bokmärkesknappen upprepade gånger tills du kommer till Symbolmetoden och mata sedan in symbolerna.

För att navigera inom symboltabellen, tryck på 2 för att gå uppåt, 8 för att gå neråt, 4 för att gå åt vänster, samt 6 för att gå åt höger. Symboltabellen beskrivs nedan. För att göra flera symbolinmatningar, tryck på fyrkant mellan varje symbol.

.	,	'	"	:	;	?	
+	-	=	/	\	_	[]
!	@	#	\$	%	`	{	}
^	&	*	()	~	<	>

22.4. Flytta inmatningsmarkören

Teckensteg bakåt

Tryck på Pil Vänster för att flytta ett teckensteg bakåt.

Flytta ett teckensteg framåt

Tryck på Pil Höger för att flytta ett teckensteg framåt.

Ett ord bakåt

Håll ner Pil Vänster och tryck samtidigt på nollan för att flytta ett ord bakåt.

Gå ett ord framåt

Håll ner Pil Höger och tryck samtidigt på nollan för att flytta ett ord framåt.

Gå tillbaka till radens början

Tryck och håll Pil Vänster intryckt för att gå tillbaka till radens början.

Alternativt kan du trycka på stjärna och femman samtidigt.

Gå framåt till radens slut

Tryck på Pil Höger och håll den nedtryckt för att gå framåt till radens slut.

Alternativt kan du trycka på stjärna och åttan samtidigt.

Gå tillbaka en rad

Tryck på Pil Upp för att gå tillbaka en rad.

Gå en rad framåt

Tryck på Pil Ner för att gå en rad framåt.

Gå en skärm (40 rader) bakåt

Tryck på stjärna och sexan samtidigt för att gå en skärm bakåt (40 rader upp).

Gå en skärm (40 rader) framåt

Tryck på stjärna och nian samtidigt för att gå en skärm framåt (40 rader ner).

Gå ett Stycke bakåt

Tryck på Pil Upp och nollan samtidigt för att gå ett stycke bakåt.

Gå ett stycke framåt

Tryck på Pil Ner och nollan samtidigt för att gå ett stycke framåt.

Gå tillbaka till början av texten

Tryck på Pil Upp och håll den intryckt för att gå bakåt till textens början.

Gå framåt till slutet av texten

Tryck på Pil Ner och håll den intryckt för att gå framåt till textens slut.

22.5. Inmatning av mellanslag, radskifte och teckenradering

Mellanslag (blanksteg)

Tryck på fyrkant för att mata in ett mellanslag.

Backstegstangenten (radera föregående tecken)

Tryck på stjärna för att radera föregående tecken.

Radera skrivtecknet under markören

Tryck på stjärna och sjuan samtidigt för att radera skrivtecknet där markören befinner sig.

Radera alla skrivtecknen i inställningsmenyn

Tryck på stjärna och håll knappen intryckt.

Radera samtliga skrivtecken vid textredigering

Se avsnitt 21.7, "Radering av hela texten."

Radera rad

Se avsnitt 21.6, "Radering av rad".

Radskifte

Tryck på stjärna och fyrkant samtidigt för att påbörja en ny rad.

Tab-tecken

Tryck på stjärna och tvåan samtidigt för att mata in ett tab-tecken.

Växling mellan lägena "Inskrivning" och "Överskrivning."

Tryck på stjärna och fyran samtidigt för att växla mellan lägena "Inskrivning" och "Överskrivning."

23. Andra användbara funktioner

23.1. Aktivera den inbyggda hjälpfilen

För att aktivera den inbyggda hjälpfilen, gör följande:

- Tryck på knapp 0 en gång.
- Navigering i filen sker på samma sätt som i andra böcker av formatet Daisy - endast text.

För att lämna den inbyggda hjälpfilen, gör följande:

- Tryck på knapp 0 en gång.

23.2. Kontrollera systemegenskaper

För att ta reda på systemversionen, serienumret och PDTB-nyckelinformation på din PLEXTALK, gör på följande sätt:

- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "systeminställningar" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "Systemegenskaper" och aktivera det med knappen Enter.
- Systemversionen och serienumret kommer att upprepas till du avbryter. PDTB-informationen kommer endast att spelas upp om du har installerat nyckeln.
- När du har noterat informationen som du behöver, tryck Enter för att lämna menysystemet.

23.3. Radering av behörighetskoder

Gör så här för att ta bort alla behörighetskoder som inregistrerats för PLEXTALK:

- Tryck på Meny-knappen.
- Gå till alternativet "Systeminställningar" med hjälp av Pil Vänster och Pil Höger och tryck på Enter.
- Använd Pil Vänster och Pil Höger för att gå till alternativet "Radera valideringssnycklar" och tryck på Enter.
- PLEXTALK kommer då att fråga om du vill fullfölja processen. Tryck i tur och ordning på nummerknapparna 1234 följt av Enter för att radera koderna.

Märk. Det är viktigt att du trycker på sifferknapparna 1 2 3 4 i exakt ordningsföljd.

Märk. Så kallade behörighetskoder är koder som ger dig tillstånd att lyssna på DAISY-böcker som är skyddade därför att de är PDTB-formaterade. PDTB är digital krypteringsteknologi utarbetad av DAISY Consortium.

23.4. Återställ PLEXTALK till fabriksinställningar

För att återställa alla inställningarna till fabriksinställningar, gör följande:

- Tryck på Meny-knappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "systeminställningar" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd Vänster eller Höger knapp för att gå till "Återställ alla inställningar till standard" och aktivera det med knappen Enter.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta. Tryck Enter för att återställa alla inställningar till fabriksens standardinställningar eller knappen Avbryt för att inställa. PLEXTALK startar om efter en kort stund.

Nedan följer en lista över fabriksinställningarna för PLEXTALK.

- Vänteljud: Vänteljud 1
- Inställning för talsyntes, tonhöjd: 0
- Ljudkälla: Extern mikrofon
- Inspelningsläge: Standard
- Automatisk inställning för avsnitt: Ingen inställning
- Nivå för bakgrundsljud: Normal
- Tid för automatiskt stopp av inspelningen: Ingen inställning
- Metod för start av inspelning: När Inspelningsknappen trycks in
- Automatisk reglering av ljudstyrka: På
- Guideröst vid inspelning: Guideröst på
- Röstbokmärke: Spela upp
- Inspelningsvolym: 10
- Inställning för uppspelning: Normal uppspelning
- Hastighet för uppspelning: 0
- Tonläge för uppspelning: 0
- Guidevolym: 0
- Volym för uppspelning: 13
- Uppläsning av audio-filens namn: Läs upp filnamnet
- Uppspelningsinställning för Multimedia DAISY: Audio

Märk. Alla bokmärken raderas när samtliga parametrar återställs till fabriksinställningarna.

Märk. Nätverksinställningarna går inte förlorade om samtliga parametrar återställs till fabriksinställningarna. Se avsnitt 20.3.7, "Återställning av nätverksparametrarna till fabriksinställningarna".

Appendix A - Huvudspecifikationer

Märk: Shinano Kenshi reserverar alla rättigheter till att modifiera produkterna som beskrivs i denna manual när som helst utan tidigare förvarning.

Detta avsnitt beskriver i detalj huvudspecifikationerna för PLEXTALK PTP1.

Allmänna specifikationer

Plats för SD-kort:
SD/SDHC-kort

Uppspelningsbart innehåll:

Böcker som följer standarden DAISY 2.0, 2.02 och 3.0.

Ljudfiler i formatet MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) format och Audible Format 4(.aa).

Musikskivor (CD-DA) (Extern USB-CD/DVD-spelare)

Textfil: ASCII-text, html, Microsoft .doc, .docx

Webbradio

PLEXTALK har support för spellistor av filtyp: PLS, M3U, ASX

Spelbara Audio-format: MP3, WMA

Format (protokoll) för direktuppspelning: HTTP, mms

Inspelningsmetod:

DAISY 2.02

Inspelningsbara ljudformat för DAISY 2.02:

PCM 44.1kHz stereo

PCM 22.05kHz mono

Mp3 256kbps 44.1kHz stereo

Mp3 128kbps 44.1kHz stereo

Mp3 64kbps 44.1kHz mono

Mp3 32kbps 22.05kHz mono

Inspelningsbara ljudformat för Röstanteckningar:

MP3 32kbps Mono

Ljudingång och ljudutgång:

Hörlursuttag (Stereo)

Extern mikrofon/Line-in-kontakt (Stereo)
Inbyggd mikrofon (Mono)
Inbyggd högtalare (Mono)

Anslutningskontakter för externa enheter:
USB 2.0
USB OTG (USB ström)

Klockprecision:
Ungefär 60 sekunder per månad

Elektrisk strömkälla:
Strömadapter, AC 100 V till 240 V, 50 eller 60 Hz

Dimensioner och vikt:
Längd 112 mm
Bredd 55 mm
Höjd 16 mm
Ungefärlig vikt 110g

Strömkonsumtion (maximalt):
20W

Arbetstemperatur och luftfuktighet:
Fahrenheit från 40 till 104
Celsius från 5 till 40
Luftfuktighet från 20% till 80%, ingen fukt.

Ljudegenskaper

Hörlurar (linjeutgång):
Kompatibel impedans 32 ohm, obalancerad
Kontakt, 3.5mm i diameter stereo mini-plugg

Extern mikrofon (plug-in-ström):
Ingångsimpedans 2.2k ohm, obalanserad
Kontakt, 3.5mm i diameter stereo mini-plugg

Linjeingång:
Ingångsimpedans 20k ohm, obalanserad
Kontakt, 3.5mm i diameter stereo mini-plugg

Inbyggd högtalare:
Utgångsimpedans 8 ohm
Uteffekt 150mW

Inbyggd mikrofon:
Elektrisk kondensatormikrofon

Huvudfunktioner

Guideröst:

Meddelar information om den aktuella operationen i talform
Ger knappbeskrivningar i knappbeskrivningsläget
Uttalar menyalternativ
Ger hjälpinformation (tryck på knapp 5)

Sökfunktion:

Rubrik, Grupp, Sida, Fras, Bokmärke, Album, Spår, Nivå, Skärm, Stycke, Rad, Mening,
Bokstavera, Ord, Tecken

Justering av volym:
0 till 25 (i steg om 1)

Justering av guidevolym:
-5 till +5 (i steg om 1)

Justering av uppspelningshastighet:
11 inställningar från -2 till 0 till +8 (i steg om 1)
Normal hastighet är 0.
-2 är halv hastighet, +4 dubbel hastighet, +8 trippel hastighet.

Justering av tonhöjd:
13 inställningar från -6 till 0 till +6 (i steg om 1)
Normal tonhöjd är 0.

Inspelningstid (för SD-kort, 2GB):
(Märk: Alla tider är ungefärliga)
DAISY PCM 44.1kHz stereo 3 timmar
DAISY PCM 22,05kHz stereo 12 timmar
DAISY MP3 256kbps stereo 15 timmar
DAISY MP3 128kbps stereo 30 timmar

DAISY MP3 64kbps mono 60 timmar
DAISY MP3 32kbps mono 120 timmar

Justering av inspelningsnivå:

Välj ingångstyp mellan extern mikrofon och linjeingång

0 till 20 (1 steg i taget)

Tillgänglig Automatisk Nivåkontroll (AGC)

Minnesfunktion:

Bokmärken och röstbokmärken, maximalt 10000

Röstbokmärken, totalt 30 minuters inspelningstid

Röstanteckning, totalt 30 minuter inspelningstid, 200 objekt

Batterispecifikationer

Typ: Litiumpolymer

Dimensioner:

Längd 40 mm

Bredd 75 mm

Höjd 20 mm

Kapacitet: 1500 mAh

Uppladdningstid :

Ungefär 4 timmar med ansluten nätadapter.

Ungefär 4.5 timmar via USB-kabel.

Märk: Uppladdning via USB-kabel fungerar med enheten avstängd.

Drifttid:

Daisyformat, MP3-inspelning, 8 timmar

Daisyformat, MP3-uppspelning, 10 timmar

Märk: Alla tider är ungefärliga

Märk: Laddningstiden och drifttiden kan variera beroende på omgivande temperatur samt arbetsförhållanden.

Specifikationer för minneskortläsare

Korttyp: SD/SDHC kort

Filsystem: FAT-32/16

Operativsystem: Windows 2000, XP, Vista eller Windows 7

Trådlös kommunikation

Trådlöst nätverk: IEEE802.11b/g

Upphovsrättsinformation om Ogg Vorbis.

Denna mjukvara tillhandahålls av upphovsrättsägarna "som den är" och alla tydliga eller antydda garantier, inklusive, men ej begränsad till, den antydda garanti av säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål är förkastad. Inte i något fall skall grundaren eller medarbetare hållas ansvariga för någon direkt, indirekt, tillfällig, speciell eller följdriktig skada (inklusive, men ej begränsad till, anskaffande av utbytesvara eller tjänst; förlust, data, vinst eller användning; eller störning av affärsverksamhet) hur den än uppkommit och oberoende av alla ansvarsteorier samt om det står i kontrakt, eller inneburit kränkning (inklusive vårdslöshet eller annat) som uppstått på något sätt genom användning av denna mjukvara, även om information om möjlighet till sådan skada tillhandahållits.

Appendix B - Menyhierarkin

Detta appendix listar alla menyalternativ i huvudmenyn samt underliggande menyer i deras hierarkiska ordning.

Redigera:

- Lägg in rubrik
- Radera rubrik
- Radera avsnitt

Redigera (textfil):

- Radera den aktuella raden
- Radera all text i filen
- Spara den redigerade texten
- Spara och avsluta textredigering
- Avsluta textredigeringsläget utan att spara
- Byt namn på textfilen

Inspelningsinställningar:

- Välj inspelningsläge
 - Standard
 - Konferens
 - Ljud
 - Ljudkassetter
 - Radio
 - Anpassat
- Välj sedan ljudkvalité från följande
 - PCM 44.1kHz stereo
 - PCM 22.05kHz mono
 - Mp3 256kbps 44.1kHz stereo
 - Mp3 128kbps 44.1kHz stereo
 - Mp3 64kbps 44.1kHz mono
 - Mp3 32kbps 22.05kHz mono
- Slå på eller av guideröst vid inspelning.
 - Guideröst på
 - Guideröst av
- Växla extern ljudingång
 - Mikrofon läge
 - Line in läge
- Automatisk reglering av ljudstyrka
 - Automatisk reglering av ljudstyrka på

Automatisk reglering av ljudstyrka av

Uppspelningsinställningar:

- Inställningar för slumpvis uppspelning samt upprepning
 - Standarduppspelning
 - Upprepa titel (Daisy, text, ljudböcker)
 - Upprepa spår (Musik)
 - Upprepa album (Musik)
 - Upprepa alla album (Musik)
 - Slumpvis uppspelning med upprepning. (Musik)
- Läser namn på ljudfil
 - Läs namn på ljudfil
 - Läs nummer för ljudspår
- Inställning för Multimedia DAISY
 - Ljud
 - Text

Bokmärke:

- Inställning för uppspelning av röstbokmärken.
 - Röstbokmärke på
 - Röstbokmärke av
- Radera alla bokmärken i aktuell bok.

Röstanteckning:

- Radera vald röstanteckning.
- Radera alla röstanteckningar.

Poddradio:

- Uppdatera listan med episoder
- Ladda ner alla episoderna i sändningen

Hantera lagringsmedia:

- Bokinformation för lagringsmedia.
- Radera SD kort
- Skapa ny bok
- Skapa en ny textfil
- Radera vald bok (Radera valt album, Radera alla röstanteckningar)
- Radera fil
- Förbered för redigering
- Färdigställ bok
- Nätverksmapp

Systeminställningar:

Systemegenskaper

- Systemversion

- Serienummer

- Installerad nyckel (om någon finns)

Välj talsyntesröst

- Röst 1

- Röst 2

Välj vänteljud

- Vänteljud 1

- Vänteljud 2

- Inget vänteljud

Välj ljud för Knapptryckning

- Ljud vid Knapptryckning På

- Ljud vid Knapptryckning Av

Ställ in datum och tid

Inställning av tonhöjd för talsyntes

Nätverksinställningar

- Verifiera nätverksinformation

- Hämta nätverksinställningar

- Spara inställningarna för nätverket

- Aktivera eller avaktivera nätverksenheten

- Inställningar för trådlöst nätverk

 - Tillgängligt trådlöst nätverk

 - Lägg till inställning för trådlöst nätverk

 - Ändra eller lägg till inställning för trådlöst nätverk

 - Tilldela högsta prioritet och anslut

 - Ändra inställning för trådlöst nätverk

 - Ta bort inställning för trådlöst nätverk

- Inställning för nätverksmapp

- Återställ nätverksparametrarna till fabriksinställningar

Radera valideringssnycklar

Återställ alla inställningar till standard

Appendix C - Felsökning

Generella driftproblem

Symptom: Du trycker på strömbrytaren med enheten startar inte.

Möjlig orsak 1: Glapp eller lös sladd eller strömadapter.

Lösning: Sätt in strömkontakten ordentligt i PLEXTALK och försäkra dig om att strömadaptern är ordentligt insatt i väggkontakten.

Möjlig orsak 2: Knapplåset är på.

Lösning: Slå av knapplåset.

Symptom: Strömmen är på med PLEXTALK fungerar inte.

Möjlig orsak: Knapplåset är på.

Lösning: Slå av knapplåset.

Symptom: PLEXTALK stänger inte av och inga knappar fungerar.

Möjlig orsak 1: Knapplåset är på.

Lösning: Slå av knapplåset.

Möjlig orsak 2: Okänt fel.

Lösning: Tryck ner och håll inne strömbrytaren i mer än 10 sekunder.

Om detta inte fungerar, ta ur strömadaptern och batteriet ur enheten och sätt in dem igen.

Symptom: Kan inte spela in på ett SD-kort.

Möjlig orsak 1: Fel på ingångskällan.

Lösning: Kontrollera ingångskällan och att korrekt inställning är vald för ingången.

Möjlig orsak 2: Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på SD-kortet.

Lösning: Radera antingen onödigt innehåll från det aktuella SD-kortet eller sätt in ett annat SD-kort med tillräckligt minne.

Möjlig orsak 3: SD-kortet är i skrivskyddat läge.

Lösning: Ta ut SD-kortet och ställ knappen för skrivskydd i sin "upplåsta" position och sätt in kortet i PLEXTALK igen.

Symptom: Inspelningsnivån kan inte justeras.

Möjlig orsak: Inställningen "Automatisk reglering av ljudstyrka" är på.

Lösning: Ändra "Automatisk reglering av ljudstyrka" till "av" i menyn "Inspelningsinställningar".

Symptom: Det finns ingen guideröst.

Möjlig orsak 1: Guidevolymen har ställts till 0.

Lösning: Öka guidevolymen så att guiderösten kan höras.

Möjlig orsak 2: Inställningen "Slå på eller av guideröst vid inspelning" är ställd till "Guideröst av".

Lösning: Ändra inställningen till "Guideröst på".

Felmeddelanden vid uppspelning av Daisy

Guideröst: " Saknar stöd för SD-kortet" eller " Saknar stöd för USB-enheten".

Möjlig orsak: SD-kortet eller USB-mediet har formaterats med ett filsystem som inte stöds.

Lösning: Sätt in ett SD-kort som har formaterats som FAT-16 eller FAT-32.

Guideröst: "Läsfel"

Möjlig orsak: Boken kan inte spelas upp.

Lösning: Tryck på knappen Boklista följt av Vänster eller Höger knapp för att försöka välja en annan bok.

Fel vid användning av Röstanteckningar

Guideröst: "Inte tillräckligt med plats i minnesområdet för röstanteckningar."

Möjlig orsak: Finns inte tillräckligt med ledigt internt minne för inspelning av en ny röstanteckning.

Lösning: Frigör lite minnesutrymme genom att radera röstanteckningar som ej behövs längre. Det kan tänkas att du vill säkerhetskopiera dina röstanteckningar innan du utför denna process.

Fel när PLEXTALK används som extern kortläsare för en dator

Symptom: Enheten fungerar inte.

Möjlig orsak 1: USB-kabeln är inte korrekt ansluten.

Lösning: Anslut USB-kabeln på nytt. Kontrollera kabeln, anslutningarna samt om några stift är böjda, tilltryckta eller skadade.

Möjlig orsak 2: Strömmen är inte på.

Lösning: Kontrollera att strömkabel och strömadaptern är korrekt anslutna samt att PLEXTALK är igång.

Symptom: Kan inte skriva till SD-kortet.

Möjlig orsak 1: SD-kortet är skrivskyddat.

Lösning: Ta ut kortet, flytta låsknappen till sin upplåsta position, sätt in det i PLEXTALK samt försök igen.

Möjlig orsak 2: Strömmen är inte på.

Lösning: Kontrollera att strömkabel och strömadaptern är korrekt ansluta samt att PLEXTALK är igång.

Möjlig orsak 3: USB-kabeln är inte korrekt ansluten.

Lösning: Anslut USB-kabeln på nytt. Kontrollera kabeln, anslutningarna samt om några stift är böjda, tilltryckta eller skadade.

Symptom: Ingenting kan läggas till på SD-kortet.

Möjlig orsak 1: Det finns inte tillräckligt med utrymme på SD-kortet för datan.

Lösning: Frigör lite utrymme på SD-kortet och försök igen.

Möjlig orsak 2: SD-kortet är skrivskyddat.

Lösning: Ta ut kortet, flytta låsknappen till sin upplåsta position, sätt in det i PLEXTALK samt försök igen.

Appendix D - Tekniska data för inspelningslägen och ljudkvalité

1. Inspelningslägenas inställningar

Varje inspelningsläge har förinställda parametrar för 4 inställningar.

- Automatisk inställning för avsnitt – PLEXTALK kan ställas in så att den automatiskt skapar ett nytt avsnitt i en Daisyinspelning efter en specificerad tid med tystnad, till exempel 2 sekunder. Använd inställningen "ingen inställning" för att skapa en kontinuerlig inspelning utan nya avsnitt.
- Tid för automatisk stopp av inspelningen när inget ljud hörs – detta är mängden tid som PLEXTALK kommer att fortsätta spela in då inget ljud hörs. Efter denna tid förflutit stannar inspelningen automatiskt.
- Metod för start av inspelning – inspelningen kan ställas in för att starta när du trycker på Inspelningsknappen eller när ljud upptäcks.
- Nivå för bakgrundsljud på ingångsljudet – om du spelar in i en miljö med lite bakgrundsljud, såsom en studio, använd inställningen "låg". Om du spelar in i en miljö med mycket bakgrundsljud, såsom en konferens eller föreläsning, använd inställningen "hög".

2. De förinställda inspelningslägenas parametrar

De förinställda parametrarna för de 5 inspelningslägena är följande:

Läget standard:

- Automatisk inställning för avsnitt: Av
- Tid för automatisk stopp av inspelningen när inget ljud hörs: Av
- Metod för start av inspelning: När Inspelningsknappen trycks in
- Nivå för bakgrundsljud på ingångsljudet: Normal (-28 dB)

Läget konferens:

- Automatisk inställning för avsnitt: Av
- Tid för automatisk stopp av inspelningen när inget ljud hörs: Av
- Metod för start av inspelning: När Inspelningsknappen trycks in
- Nivå för bakgrundsljud på ingångsljudet: Hög (-20 dB)

Läget ljud:

- Automatisk inställning för avsnitt: 2 sekunder
- Tid för automatisk stopp av inspelningen när inget ljud hörs: 1 minut

- Metod för start av inspelning: När Inspelningsknappen trycks in
- Nivå för bakgrundsljud på ingångsljudet: Låg (-40 dB)

Läget analog kasset:

- Automatisk inställning för avsnitt: 4 sekunder
- Tid för automatisk stopp av inspelningen när inget ljud hörs: 1 minut
- Metod för start av inspelning: När ljud upptäcks
- Nivå för bakgrundsljud på ingångsljudet: Normal (-28 dB)

Läget radio:

- Automatisk inställning för avsnitt: Av
- Tid för automatisk stopp av inspelningen när inget ljud hörs: 1 minut
- Metod för start av inspelning: När ljud upptäcks
- Nivå för bakgrundsljud på ingångsljudet: Normal (-28 dB)

3. Tillgängliga inställningar för läget skräddarsytt

I läget skräddarsytt kan du ställa in varje parameter enligt nedan:

- Automatisk inställning för avsnitt kan sättas till: "Av", "1 sekund", "2 sekunder", "3 sekunder", "4 sekunder" eller "5 sekunder".
- Tid för automatisk stopp av inspelningen när inget ljud hörs kan sättas till: "Av", "30 sekunder", "1 minut", "2 minuter", "3 minuter" eller "4 minuter" eller "5 minuter".
- Metod för start av inspelning kan sättas till antingen "när inspelningsknappen trycks in" eller "när ljud upptäcks".
- Nivå för bakgrundsljud på ingångsljudet kan sättas till: "Låg (-40 dB)", "Normal (-28 dB)" eller "Hög (-20 dB)".

Märk: Inställningarna för de förinställda inspelningslägena kan inte ändras. Inställningarna för inspelningsläget skräddarsytt kan ändras så att det passar dina inspelningskrav.

Märk: När du använder den inbyggda mikrofonen för att spela in kommer inställningen för bakgrundsljud automatiskt att sättas till "Hög".

4. Möjlig inspelningstid för olika ljudkvalitéer

Den möjliga inspelningstiden beror på inställningen på ljudkvalitén du väljer. Ju högre ljudkvalité, desto kortare inspelningstid. Nedan listas den ungefärliga inspelningstiden som du kan förvänta dig med 4 typer av medium.

PCM 44.1kHz stereo:

- SD-kort, 1GB: 90 minuter
- SD-kort, 2GB: 3 timmar
- SD-kort, 4GB: 6 timmar
- SD-kort, 8GB: 12 timmar

PCM 22.05kHz mono:

- SD-kort, 1GB: 6 timmar
- SD-kort, 2GB: 12 timmar
- SD-kort, 4GB: 24 timmar
- SD-kort, 8GB: 48 timmar

Mp3 256 k stereo:

- SD-kort, 1GB: 7,5 timmar
- SD-kort, 2GB: 15 timmar
- SD-kort, 4GB: 30 timmar
- SD-kort, 8GB: 60 timmar

Mp3 128 k stereo:

- SD-kort, 1GB: 15 timmar
- SD-kort, 2GB: 30 timmar
- SD-kort, 4GB: 60 timmar
- SD-kort, 8GB: 120 timmar

Mp3 64 k mono:

- SD-kort, 1GB: 30 timmar
- SD-kort, 2GB: 60 timmar
- SD-kort, 4GB: 120 timmar
- SD-kort, 8GB: 240 timmar

Mp3 32 k mono:

- SD-kort, 1GB: 60 timmar
- SD-kort, 2GB: 120 timmar
- SD-kort, 4GB: 240 timmar
- SD-kort, 8GB: 480 timmar

Märk: De ovan nämnda inspelningstiderna är uppskattningar och kan variera beroende på antalet rubriker och andra strukturelement i inspelningarna.

Appendix E - Frågor och svar rörande nätverksinställning

Problem/Fråga	Lösning/Svar
Jag skulle vilja veta vad PLEXTALK har för IP-adress.	Du kan verifiera IP-adressen om du går till alternativet "Verifiera nätverksinformation" i menyn "Nätverksinställningar."
PLEXTALK låter mig inte välja den önskade accesspunkten.	Du hittar listan med tillgängliga accesspunkter om du går till alternativet "Inställningar för trådlösa nätverk" under "Nätverksinställning." Om PLEXTALK inte hittar accesspunkten, kontrollera att status för nätverkets strömkälla är påslagen. Om accesspunkten finns på listan, kontrollera vilken prioritet den står inställd på. Du kan ändra prioritet genom att gå till "Tilldela högsta prioritet och anslut" under "Nätverksinställningar."
Kunde inte hitta accesspunkten. Jag använder accesspunkt som möjliggör IEEE802.11a.	PLEXTALK har enbart programstöd för IEEE802.11b/g. Om din accesspunkt inte kan utnyttja IEEE802.11a och IEEE802.11b/g samtidigt, var god välj IEEE802.11b/g.
Kunde inte ansluta till accesspunkten. Jag använder en SSID som inte radiosänder.	Det kan ta väldigt lång tid för PLEXTALK att få förbindelse med en SSID som inte radiosänder. Du kan få vänta i fem minuter innan det går att fastställa om PLEXTALK kan koppla upp eller inte. Försök att om möjligt konfigurera din accesspunkt så att namnet på SSID är aktiverat för radiosändning. Om anslutningen lyckas efter att radiosändning aktiverats, har du konfigurerat din nätverksinställning riktigt. Att ställa in parametern på avaktiverad radiosändning medför problem. Om anslutningen misslyckades trots att radiosändning av SSID aktiverats, Kontrollera säkerhetsinställningarna för trådlöst nätverk.
Kunde inte ansluta till accesspunkten. Jag använder DHCP.	Om PLEXTALK var i stånd att etablera förbindelse med accesspunkten men inte lyckades hitta IP-adressen, dyker meddelandet "Kunde ej ansluta" upp. Försök i så fall med "fast IP-adress." Om anslutningen lyckas med inställningen "fast IP-adress", var det DHCP-servern som orsakade problemet. Kontrollera då dina inställningar för DHCP-server. Om anslutningen fortfarande inte lyckas, kontrollera säkerhetsinställningarna för trådlöst nätverk.
Kunde inte ansluta till accesspunkten. Jag använder filtrering för MAC-adress.	När filtrering för mac-adress aktiverats under accesspunktens säkerhetsparametrar, vägrar PLEXTALK att ansluta sig till en icke konfigurerad nätverksenhet. Du måste då konfigurera din accesspunkt och lägga till MAC-adressen för PLEXTALK. Om du vill verifiera PLEXTALKs MAC-adress, kan du gå till "Verifiera nätverksinformation" i menyn för nätverksinställningar.

PLEXTALK har tendensen att alltid vilja ansluta till ej tillgänglig SSID. Jag har konfigurerat SSID till "dold" också.	När du konfigurerat nätverksparametrarna så att "Dold SSID" aktiverats, försöker PLEXTALK alltid ansluta till "Dold", (dvs. ej radiosändande) SSID. Ställ in accesspunkten med dold SSID på låg prioritet i listan på trådlösa parametrar.
PLEXTALK kan inte ansluta till direktjänst. Jag använder WEP som säkerhetsparameter och fast IP-adress.	Om du använder WEP-säkerhetsinställning med fast IP-adress, kommer PLEXTALK att lyckas med anslutning till accesspunkten även om lösenordet är fel. Verifiera då lösenordet för WEP en gång till.
Har PLEXTALK programstöd för WPS (Wifi-protected setting) WIFI-skyddad inställning.	Det finns inte stöd för WPS. Den nätverksinställningen måste du själv konfigurera.
Anslutning till accesspunkten misslyckades.	Försök med omstart både av accesspunkten och PLEXTALK.

Appendix F - Lista över textinmatningar

ABC-metoden

Knappnamn	Tilldelad funktion
#1	Symboler “.”, “@”, “/”, “:”, “1”
#2	a, b, c, ä, å, 2, A, B, C, Å, Ä
#3	d, e, f, 3, D, E, F
#4	g, h, i, 4, G, H, I
#5	j, k, l, 5, J, K, L
#6	m, n, o, ö, 6, M, N, O, Ö
#7	p, q, r, s, ß, 7, P, Q, R, och S
#8	t, u, v, 8, T, U, V
#9	w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z
#0	“?”, “_”, “=”, “0”
*	Backslag
* + #	Ny rad
#	Mellanslag.
Start/Stopp	Startar uppspelning från markörposition/momentanstopp.
Pil upp	Tryck: föregående rad. Intryckt: dokumentets början.
Pil ner	Tryck: nästa rad. Intryckt: dokumentets slut.
Pil Vänster	Tryck: föregående tecken. Intryckt: Home.
Pil Höger	Tryck: Nästa tecken. Intryckt: End.
0 + Pil upp	Föregående stycke
0 + Pil ner	Nästa stycke
0 + Pil Vänster	Föregående ord
0 + Pil Höger	Nästa ord
* + 1	Spara och lämna redigeringsläget
* + 2	Tab
* + 3	Backslag
* + 4	Inskrivning/Överskrivning
* + 5	Home
* + 6	Skärm upp (40 rader upp)
* + 7	Radera

* + 8	End
* + 9	Skärm ner (40 rader ner)
Bokmärke	Välj inmatningsätt från ABC-metoden, nummermetoden, eller symboltabellen.

Symboltabell

Knappnamn	Tilldelad funktion
#1	Ej använd
#2	Tryck: upp Intryckt: Flytta högst upp i tabellen.
#3	Ej använd
#4	Tryck, Vänster. Intryckt: Gå till tabellens början.
#5	Verifiera den för närvarande valda symbolen.
#6	Tryck, Höger. Intryckt: Gå till tabellens slut.
#7	Ej använd
#8	Tryck, ner. Intryckt: Flytta längst ner i tabellen.
#9	Ej använd
#0	Ej använd
#	Mata in symbolen.
(Symboler)	Tabellen har 8 kolumner och 4 rader. ., ‘ “ : ; ? + - = / \ _ [] ! @ # \$ % ` { } ^ & * () ~ < >

* Övriga tangenter överensstämmer helt med ABC-metoden.

2011/03 UG-SWE0600-E0600